



**Instrument automatique de diagnostic
moléculaire rapide U-Card DxTM**

Modèle No.: MDx – 301

REF: W992

Manuel d'utilisation

GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO., LTD.

Rev.A2 Rel.: 16/06/2022

IVD

Sommaire

Sommaire	2
CHAPITRE 1: MODALITÉS ET CONDITIONS	4
CHAPITRE 2: MISES EN GARDE, PRÉCAUTIONS ET SYMBOLES	5
2.1 Mises en garde et précautions	5
2.1.1 Mises en garde et précautions pour l'environnement de fonctionnement.....	5
2.1.2 Mises en garde et précautions pour l'installation	5
2.1.3 Mises en garde et précautions pour le fonctionnement de l'instrument	6
2.1.4 Mises en garde et précautions concernant les cartouches de test et l'élimination des déchets.....	7
2.1.5 Mises en garde et précautions sur la compatibilité électromagnétique (EMC)	7
2.2 Symboles	8
CHAPITRE 3: Instrument U-Card Dx™	10
3.1 Utilisation prévue	10
3.2 Instrument U-Card Dx.....	10
3.3 Porte-cartouche.....	11
3.4 Spécifications et conditions de fonctionnement.....	12
3.4.1 Spécifications techniques de base	12
3.4.2 Spécifications techniques thermiques	12
3.4.3 Spécifications techniques optiques	12
3.5 Liste d'emballage.....	13
3.6 Installation de l'instrument U-Card Dx.....	14
3.6.1 Installation du papier d'impression.....	14
3.6.2 Connexion des câbles.....	15
3.7 Connexion et déconnexion de l'utilisateur	16
3.8 Configuration du système.....	17
3.8.1 Système	18
3.8.2 Imprimer	20
3.8.3 Réseau	21
3.9 Gestion des utilisateurs.....	23
CHAPITRE 4: Procédure de test	26
4.1 Saisir les informations sur l'échantillon	26

4.1.1 Saisir l'ID de l'échantillon par code-barres	26
4.1.2 Saisir manuellement l'ID de l'échantillon	27
4.2 Informations sur la cartouche à scanner	27
4.2.1 Entrer les informations de la cartouche par code-barres.....	28
4.2.2 Saisir manuellement les informations sur la cartouche.....	28
4.2.3 Chargement de l'échantillon dans la cartouche	29
4.3 Exécution du test	30
4.4 Vérification des résultats du test.....	32
4.4.1 Résultats du test actuel.....	32
CHAPITRE 5: Test de contrôle de la qualité (CQ).....	34
CHAPITRE 6: Historique.....	36
CHAPITRE 7: Entretien	39
7.1 Nettoyage des surfaces de l'instrument.....	39
7.2 Remplacement du filtre du ventilateur	40
7.3 Remplacement du fusible	40
7.4 Entretien de l'imprimante	40
7.5 Vie du produit.....	41
7.6 Élimination	41
7.7 Calibration de l'instrument.....	42
CHAPITRE 8: Dépannage	43
8.1 Problèmes de matériel.....	43
8.2 Messages d'erreur	45
8.2.1 Erreurs de communication	45
8.2.2 Erreur de commande du moteur.....	47
8.2.3 Erreurs du module TEC	50
8.2.4 Erreur du module optique	51
8.2.4 Erreurs du module Lysis	52
8.2.5 Erreurs UI.....	54
8.2.6 Erreurs post analyse	54
8.2.7 Erreurs de chargement de l'échantillon	55
CHAPITRE 9: Bibliographie.....	58
CHAPITRE 10: Contact.....	59

CHAPITRE 1: MODALITÉS ET CONDITIONS

Merci d'avoir choisi l'instrument automatique de diagnostic moléculaire rapide Wondfo U-Card Dx™ (désigné sous le nom d'instrument U-Card Dx). Cet instrument est développé, conçu, fabriqué et vendu par Guangzhou Wondfo Biotech. Ce manuel d'utilisation contient des détails sur les spécifications de l'instrument et des informations sur l'interface graphique.

Dans ce manuel, vous trouverez notamment des informations sur l'installation de l'instrument U-Card Dx, les paramètres du système, les procédures de test, les options de gestion des données, la maintenance de l'instrument, la garantie et le service clientèle. Afin d'optimiser les performances de l'instrument U-Card Dx, l'utilisateur doit suivre ces directives d'utilisation et de maintenance.

Le manuel comprend également des précautions de sécurité et des directives d'utilisation. Veuillez vous conformer strictement au manuel pour garantir une utilisation sûre de l'instrument U-Card Dx.



Dépannage : En cas de défaillance inattendue pendant le fonctionnement de l'instrument U-Card Dx, reportez-vous au «**CHAPITRE 8 : Dépannage**», ou reportez-vous au «**CHAPITRE 10 : Contact**» pour contacter le support technique.

CHAPITRE 2: MISES EN GARDE, PRÉCAUTIONS ET SYMBOLES

Avant toute utilisation de l'instrument U-Card Dx, s'assurer que l'utilisateur a lu attentivement le manuel et qu'il connaît les consignes de sécurité. S'assurer que ce document est facilement disponible en cas de doutes, de soucis ou de questions de la part de l'utilisateur.

2.1 Mises en garde et précautions

2.1.1 Mises en garde et précautions pour l'environnement de fonctionnement

- L'instrument U-Card Dx est destiné au diagnostic in vitro uniquement, et non à un usage domestique.
- La température ambiante pour une utilisation normale de l'instrument U-Card Dx est de +15 °C à +30 °C. Les températures ambiantes en dehors de cette plage peuvent affecter la précision de l'instrument U-Card Dx et endommager les composants ou circuits internes.
- Ne pas utiliser l'instrument U-Card Dx dans un environnement contenant des gaz ou des liquides inflammables afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.
- L'instrument U-Card Dx n'est pas conçu pour être étanche. Ne pas utiliser l'instrument dans un environnement où de l'eau pourrait pénétrer dans l'instrument U-Card Dx.
- Garder l'instrument U-Card Dx au sec et éviter d'exposer l'instrument à des changements rapides de température. Si l'instrument est déplacé à l'intérieur à partir d'un environnement inférieur à 15 °C, laisser 30 minutes pour que l'appareil atteigne la température ambiante, sinon de la condensation ou des gouttelettes d'eau peuvent se former et provoquer un court-circuit.
- S'assurer que l'instrument U-Card Dx n'est pas utilisé à proximité de sources électromagnétiques puissantes telles que de gros appareils de tomographie, des équipements d'oscillation magnétique nucléaire, des émetteurs sans fil, etc.

2.1.2 Mises en garde et précautions pour l'installation

- Avant d'installer l'instrument U-Card Dx, l'utilisateur doit vérifier l'instrument et l'emballage des accessoires. En cas de dommage, veuillez contacter Wondfo comme indiqué au **CHAPITRE 10 : Contact**.

- Placer l'instrument U-Card Dx sur une plate-forme ferme et stable afin de minimiser les vibrations et d'éviter que l'appareil ne tombe pendant le test.
- Pour une ventilation adéquate, maintenir un espace d'au moins 50 mm entre l'arrière et les côtés de l'instrument U-Card Dx.
- Pour éviter les risques de chocs électriques, s'assurer que la prise de courant est bien mise à la terre. Vérifier que la prise de courant est munie d'une broche de mise à la terre. Ne pas brancher ou débrancher le câble d'alimentation avec des mains mouillées.
- Placez correctement le câble d'alimentation afin qu'il ne fasse pas trébucher l'utilisateur. Veuillez utiliser les accessoires du produit fournis par Wondfo, tels que les cartouches de test et le papier d'impression. Le remplacement non autorisé des accessoires du produit peut donner des résultats inexacts et endommager l'instrument U-Card Dx.

2.1.3 Mises en garde et précautions pour le fonctionnement de l'instrument

- L'instrument U-Card Dx est destiné à un usage professionnel uniquement. Il doit être utilisé par un professionnel de la santé formé et qualifié.
- Si l'instrument U-Card Dx n'est pas utilisé de la manière spécifiée par le fabricant, les protections accordées à l'instrument sont susceptibles de prendre fin.
- S'assurer que les cartouches et autres accessoires utilisés pendant le fonctionnement ne dépassent pas leur date d'expiration respective.
- L'instrument U-Card Dx fonctionne à un niveau de bruit de 61 dB, produit uniquement par le ventilateur. Si un bruit anormal provient de l'instrument U-Card Dx, veuillez contacter Wondfo comme indiqué au **CHAPITRE 10 : Contact**.
- Avant toute utilisation de l'instrument U-Card Dx, l'utilisateur doit vérifier l'instrument et ses accessoires comme indiqué dans la **section 3.5 : Liste d'emballage**. Si l'utilisateur constate une quelconque anomalie, il ne doit pas utiliser l'instrument et doit immédiatement contacter Wondfo comme indiqué au **CHAPITRE 10 : Contact**.
- NE PAS démonter l'instrument U-Card Dx ou ses accessoires sans l'autorisation de Wondfo.
- Lors de l'utilisation de l'instrument U-Card Dx, s'assurer toujours que le système est réglé sur la date et l'heure correctes. Ces paramètres du système sont utilisés pour enregistrer les résultats des tests.
- NE JAMAIS modifier l'instrument U-Card Dx. Toute modification de l'instrument entraîne une VIOLATION de la garantie de l'instrument et peut compromettre la

sécurité de l'utilisateur.

- L'instrument U-Card Dx doit être utilisé **UNIQUEMENT** avec les cartouches U-Card Dx.
- Ne pas déplacer l'instrument pendant qu'un test est en cours.
- Ne placez aucun objet sur l'instrument U-Card Dx. Cela pourrait compromettre les performances ou causer des dommages mécaniques.
- Ne laissez pas tomber l'instrument U-Card Dx, et évitez de heurter le boîtier pendant l'opération.
- Éviter de toucher l'écran de l'instrument avec des gants qui ont été en contact avec des matières à risque biologique.
- Ne pas ouvrir la porte du chargement frontal pendant un test en cours/continu pour éviter les erreurs dans les résultats du test causées par les interférences de la lumière ambiante.
- Mettre l'instrument hors tension avant le nettoyage.
- Si l'instrument est contaminé par l'échantillon ou par tout produit chimique dangereux, suivre les instructions de nettoyage indiquées dans le manuel. Se référer aux consignes de sécurité locales pour des conseils supplémentaires.

2.1.4 Mises en garde et précautions concernant les cartouches de test et l'élimination des déchets

- Les cartouches de test doivent être retirées de l'instrument U-Card Dx une fois le test terminé.
- S'assurer que les cartouches de test utilisées pour le test ne sont pas périmées.
- La cartouche **NE PEUT PAS** être réutilisée.
- L'utilisateur doit traiter la cartouche usagée comme un déchet biologique et se conformer aux procédures et directives locales en matière de biosécurité et d'élimination des substances dangereuses.
- L'utilisateur doit respecter toutes les procédures et réglementations locales relatives à l'utilisation de gants, de lunettes de sécurité ou d'autres équipements de protection individuelle lors de la manipulation de matériaux potentiellement infectieux.

2.1.5 Mises en garde et précautions sur la compatibilité électromagnétique (EMC)

- Il incombe au fabricant de fournir au client ou à l'utilisateur des informations sur la compatibilité électromagnétique de l'instrument U-Card Dx.
- Il incombe à l'utilisateur de s'assurer qu'un environnement électromagnétique compatible peut être maintenu afin que l'instrument fonctionne comme prévu.














L'environnement électromagnétique doit être évalué avant toute utilisation de l'instrument U-Card Dx.








- Cet instrument a été conçu et testé conformément à la norme CISPR 11.
- Ne pas utiliser cet instrument à proximité de sources de fortes radiations électromagnétiques, car celles-ci peuvent interférer avec son bon fonctionnement.
- L'instrument est conforme aux exigences en matière d'immunité et d'émission décrites dans les normes EN 61326-1 et EN 61326-2-6.

2.2 Symboles

L'instrument U-Card Dx, les composants et accessoires associés, les étiquettes et ce manuel d'utilisation utilisent les symboles suivants.

Tableau 0.1 Symboles

Symbole	Description
	Avertissement
	Consulter le manuel d'utilisation
	Risques biologiques
	Marquage CE
	Pour le diagnostic <i>in vitro</i> uniquement
	Représentant autorisé européen
	Fabricant
	Date de fabrication
	Limite de température
	Limite d'humidité
	Numéro de catalogue
	Numéro de série
	Courant alternatif

Symbole	Description
	Marche
○	Arrêt
	Fragile, à manipuler avec précaution
	Garder au sec
	à l'abri de la lumière du soleil
	Ce côté vers le haut
	6 paquets identiques peuvent être empilés au maximum
	DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
	Marque de commerce

CHAPITRE 3: Instrument U-Card Dx™

3.1 Utilisation prévue

- L'instrument U-Card Dx fait partie du système de diagnostic in-vitro Wondfo U-Card Dx. L'instrument U-Card Dx est nécessaire pour traiter les cartouches de test U-Card Dx. Pour des informations spécifiques sur chaque type de test, veuillez vous reporter aux instructions de la cartouche de test U-Card Dx.
- L'instrument U-Card Dx est destiné au diagnostic in-vitro, à usage professionnel uniquement.
- L'instrument U-Card Dx est basé sur la technologie de l'amplification en chaîne par polymérase (ACP). Il est utilisé avec une cartouche de test U-Card Dx pour effectuer une détection qualitative pendant la pratique clinique.

Une fois qu'une cartouche contenant un échantillon de patient est chargée dans l'instrument, ce dernier traite l'échantillon selon les étapes suivantes :

- Préparation de l'échantillon
- Amplification de l'acide nucléique
- Détection optique

Une fois que l'instrument a terminé ces étapes, le logiciel interne détermine automatiquement si la cible du test est détectée dans l'échantillon, et rapporte le résultat qualitatif.

3.2 Instrument U-Card Dx

Les figures suivantes montrent l'instrument U-Card Dx :

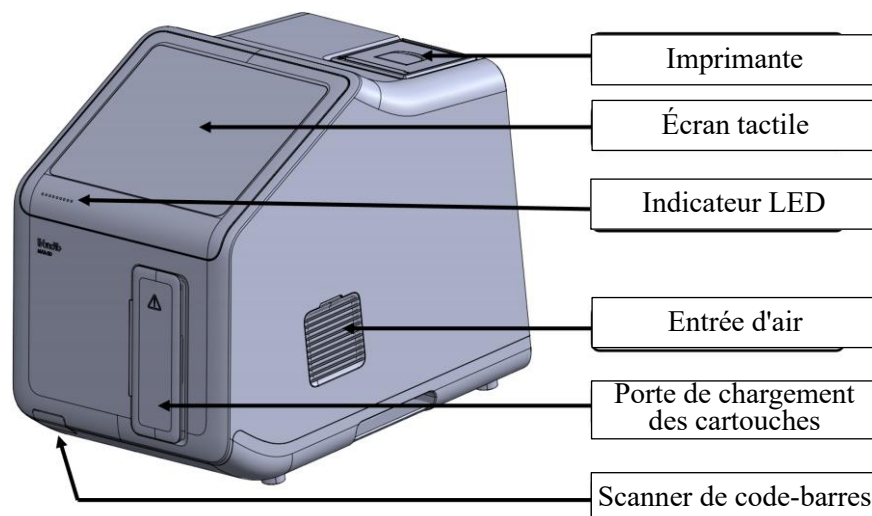


Fig. 0.1 Instrument U-Card Dx – Vue frontale

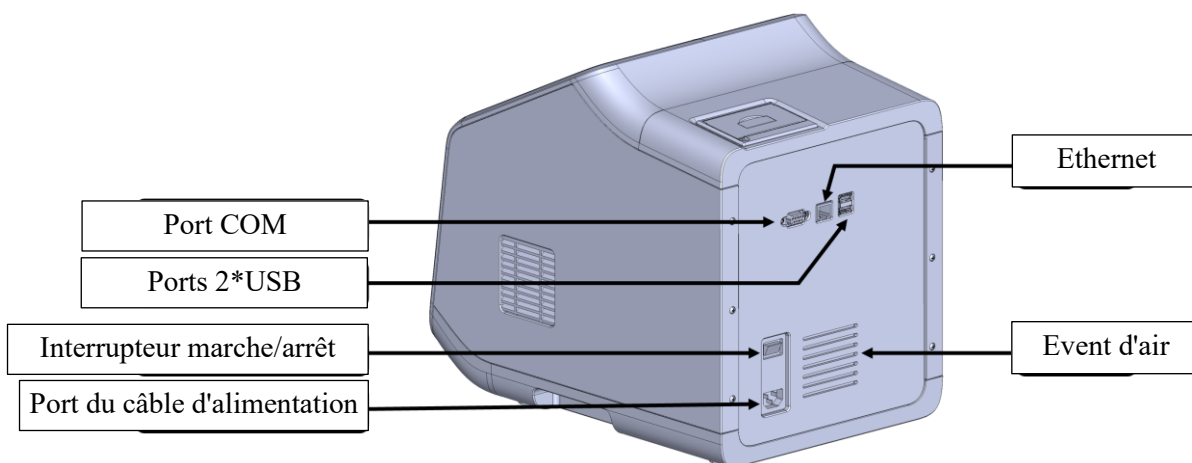


Fig. 0.2 Instrument U-Card Dx – Vue arrière



Le port Ethernet est utilisé pour la connexion Internet physique à l'appareil. Les ports USB peuvent être utilisés pour connecter un clavier externe, une souris ou des lecteurs USB. Le port COM est utilisé pour le débogage du système.

3.3 Porte-cartouche

Le porte-cartouche est inclus dans l'emballage de l'instrument. Il permet de faciliter la préparation de l'échantillon, comme le montre la figure ci-dessous :

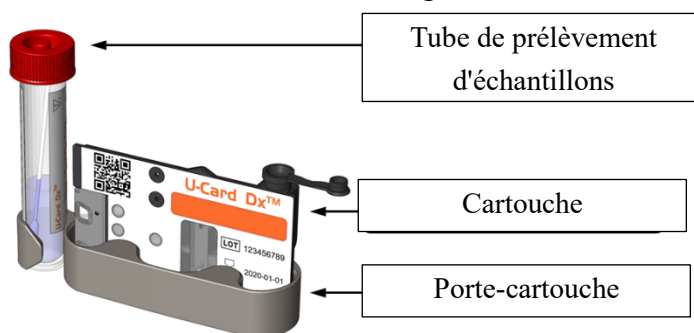


Fig. 0.3 Porte-cartouche

3.4 Spécifications et conditions de fonctionnement

3.4.1 Spécifications techniques de base

Tableau 0.1 Spécifications techniques de base de l'instrument

Dimensions	315 mm x 245 mm x 355 mm (H×L×P)
Poids	11 kg
Caractéristiques électriques	Alimentation : 100-240±10% V~, 50/60 Hz, 300W Max
Environnement de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none">• Utilisation à l'intérieur• Température ambiante : 15 °C à 30 °C• Humidité relative (HR) : 10% à 80%• Pression atmosphérique : 85.0 à 106.0 kPa• Altitude : jusqu'à 2000m• Degré de pollution : 2
Ports	<ul style="list-style-type: none">• 1×Ethernet• 1×Port COM• 2×Ports USB
Fusible	<ul style="list-style-type: none">• F6.3AL250V, Φ5*20mm
Transport & stockage	<ul style="list-style-type: none">• Pour le transport, utilisez l'emballage original en carton/mousse fourni.• -5 °C à 40 °C• Humidité relative (HR) : 10% à 80%
Exportation de résultats	<ul style="list-style-type: none">• Imprimante intégrée• Stockage externe USB• Soutenir le système LIS
Capacité de traitement	<ul style="list-style-type: none">• Un quai de chargement à cartouche

3.4.2 Spécifications techniques thermiques

Tableau 0.2 Spécifications techniques thermiques de l'instrument

Taux de croissance moyen	≥ 5 °C/sec
Taux de descente moyen	≥ 4 °C/sec
Précision de la température	± 0.5 °C
Uniformité de la température	± 1 °C

3.4.3 Spécifications techniques optiques

Tableau 0.3 Gammes d'excitation et d'émission optiques de l'instrument

Canal optique	Excitation(nm)	Emission(nm)
1	455nm ~ 485nm	510nm ~ 530nm
2	520nm ~ 540nm	554nm ~ 576nm
3	560nm ~ 580nm	595nm ~ 635nm
4	620nm ~ 640nm	655nm ~ 675nm

3.5 Liste d'emballage

Après ouverture de l'emballage, veuillez vérifier les composants dans la liste d'emballage. Si un des éléments est manquant ou endommagé, veuillez contacter le distributeur ou Wondfo comme indiqué au **CHAPITRE 10 : Contact**.

Tableau 0.4 Liste d'emballage

#	Article	Quantité
1	Instrument automatique de diagnostic moléculaire rapide U-Card Dx™	1
2	Porte-cartouche	1
3	Câble d'alimentation principal	1
4	Câble Ethernet	1
5	Fusible	2
6	Papier d'impression	1
7	Manuel d'utilisation	1
8	Carte de garantie	2
9	Liste d'emballage	1
10	Certification du produit	1

Matériel nécessaire mais non fourni

Tableau 0.5 Matériel nécessaire mais non fourni

Matériel	Requis/optionnel
Cartouches U-Card Dx™	Requis Fourni dans le cadre du kit de test
Ecouvillons nasopharyngés	
Tubes de prélèvement d'échantillons	
Pipettes de transfert	
Gants jetables sans poudre	Optionnel

Solution d'hypochlorite de sodium à 10% (ou équivalent)	Optionnel
Isopropanol ou éthanol à 70%	Optionnel

L'instrument U-Card Dx doit être déballé et installé en suivant les étapes décrites dans ce guide.

1. Vérifiez l'emballage pour vous assurer qu'il n'y a pas de signes visibles de dommages causés par le transport.
2. Avec la boîte de l'instrument en position verticale, retirez la liste d'emballage, le porte-cartouche et le câble d'alimentation principal de la boîte. Retirez la mousse supérieure et soulevez l'instrument pour le sortir complètement de sa boîte. Retirez la mousse attachée.
3. Placez l'instrument en position verticale sur une surface plane, stable, avec un minimum de vibrations et contenant un espace suffisant pour assurer un dégagement de ventilation d'au moins 50 mm sur les côtés et à l'arrière de l'instrument.
4. Conservez la boîte à instruments et les inserts en mousse pour un transport ultérieur.



En cas de nécessité de déplacer ou de transporter l'instrument, utilisez la boîte conservée et les inserts en mousse pour réemballer l'instrument. Veuillez contacter le distributeur ou Wondfo comme indiqué au **CHAPITRE 10 : Contact** pour toute question.

3.6 Installation de l'instrument U-Card Dx

3.6.1 Installation du papier d'impression

Procédure :

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à papier de l'imprimante (insérez le pouce/doigt et tirez le loquet).
2. Placez le nouveau rouleau de papier d'impression dans le compartiment d'impression de l'imprimante. L'avant du papier d'impression doit faire face à la tête d'impression thermique.
3. Tirez le papier d'impression sur environ 2 cm et fermez le couvercle du compartiment à papier de l'imprimante. Assurez-vous que la position du rouleau de papier d'impression ne se déplace pas pendant que vous le tirez.



- N'utilisez que les rouleaux de papier d'impression recommandés par Wondfo. Dans le cas contraire, cela pourrait endommager l'imprimante thermique intégrée et ne serait pas couvert par la garantie.
- Ne touchez pas directement la tête d'impression thermique et le détecteur de papier pour éviter tout dommage causé par l'électricité statique.

- Le couvercle du compartiment du papier d'impression doit toujours rester fermé, sauf pour l'entretien ou le remplacement du rouleau de papier d'impression.

3.6.2 Connexion des câbles

1. Branchez le câble d'alimentation à la prise de courant murale.
2. Branchez le câble d'alimentation sur le port d'alimentation de l'instrument.
3. Connectez d'autres ports si nécessaire

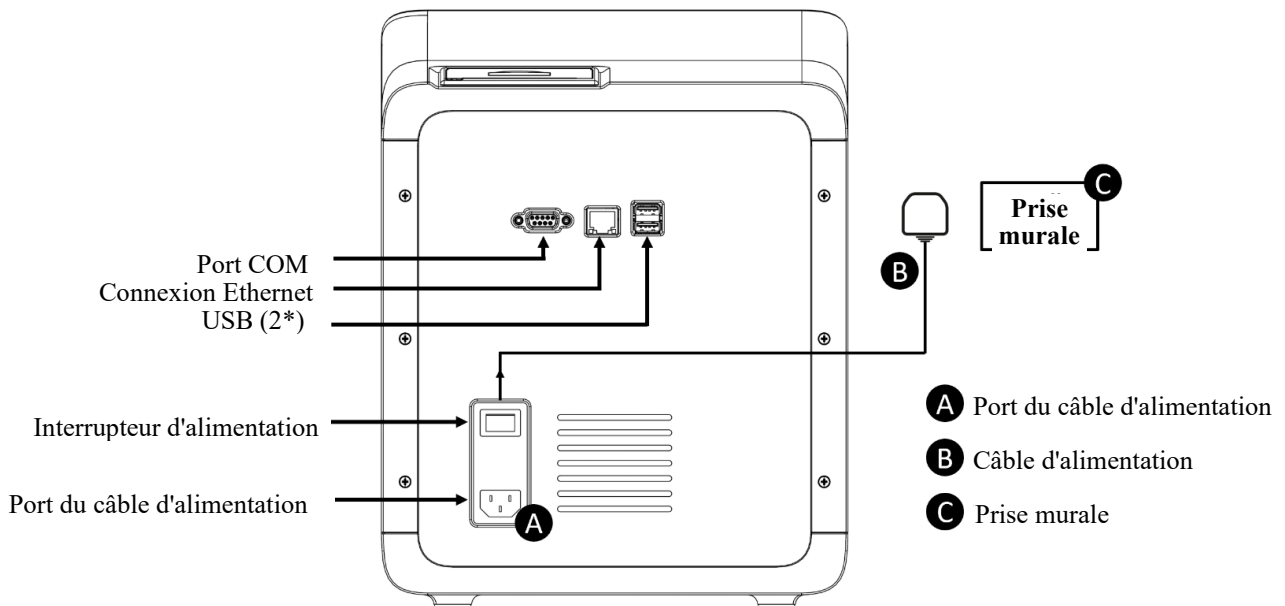


Fig. 0.4 Branchement de l'alimentation

4. Appuyez sur l'**interrupteur d'alimentation** situé sur le **panneau arrière** pour mettre l'instrument sous tension. Le voyant du panneau avant devient vert et l'écran suivant s'affiche pour indiquer que l'instrument est en cours d'initialisation.



Fig. 0.5 Initialisation du système U-Card Dx

5. Une fois initialisé, l'écran de connexion s'affiche. Si l'instrument ne parvient pas à s'initialiser et que l'écran de connexion n'apparaît jamais, mettez-le hors tension et répétez les étapes 1 à 3. Si l'instrument ne parvient toujours pas à s'initialiser après plusieurs tentatives, veuillez contacter le distributeur ou Wondfo comme indiqué au **CHAPITRE 10 : Contact**.

3.7 Connexion et déconnexion de l'utilisateur

L'instrument comprend deux comptes de connexion : (i) le compte administrateur par défaut, et (ii) le compte utilisateur. Il est recommandé d'utiliser le compte administrateur pour configurer l'instrument et gérer les comptes utilisateurs individuels. Il est recommandé d'utiliser le compte utilisateur pour les opérateurs qui exécutent les cartouches de test. Les deux options de connexion sont décrites en détail ci-dessous.

L'ID utilisateur par défaut de l'administrateur est **Admin**. L'utilisateur peut appuyer sur le bouton Login pour accéder au menu principal. L'identifiant Admin a un accès complet à toutes les fonctions de l'instrument accessibles aux clients. L'Admin a également le pouvoir de créer de nouveaux comptes d'utilisateur et mots de passe.

Note : Le compte Admin ne peut pas être supprimé. Il est nécessaire de créer le mot de passe Admin après la première mise sous tension. Si vous avez perdu votre mot de passe, veuillez contacter le support client.

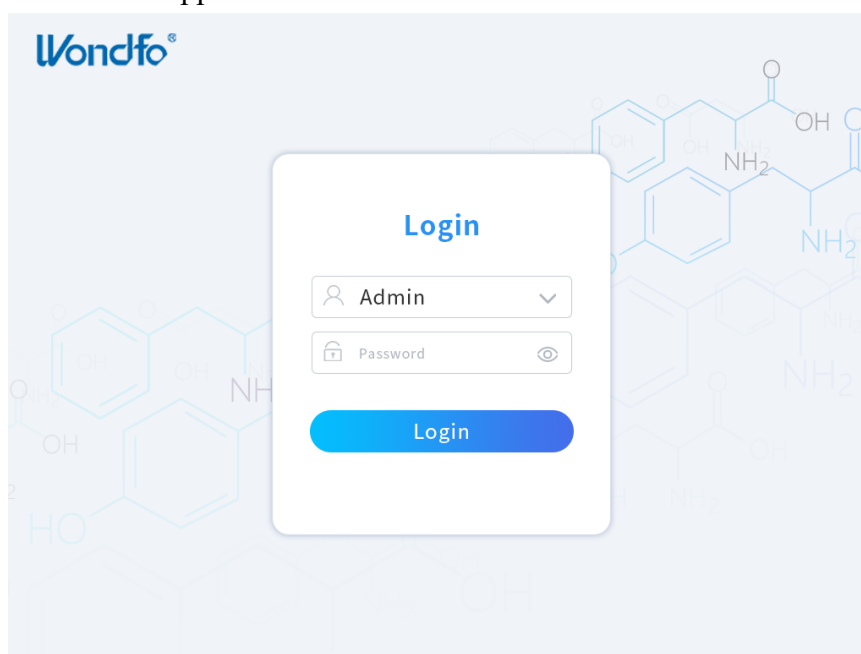


Fig. 0.6 Page de connexion

Après connexion, la page d'accueil du compte Admin est illustrée ci-dessous. L'administrateur peut créer des comptes d'utilisateur sous l'option Gestion des utilisateurs, ainsi que modifier/supprimer des comptes d'utilisateur.

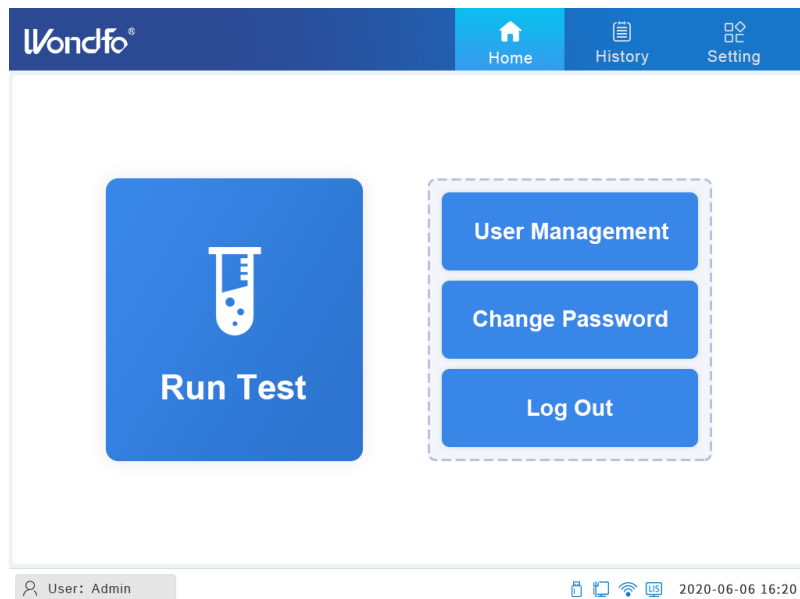


Fig. 0.7 Page d'accueil pour Admin

La page d'accueil pour la connexion de l'utilisateur sera différente, comme le montre la figure 3.8.



Fig. 0.8 Page d'accueil pour Utilisateur

Un seul compte utilisateur peut être connecté à la fois. Pour se connecter à un autre compte, cliquez sur **Déconnexion** du compte utilisateur actuel. L'instrument revient alors à la page de connexion.

3.8 Configuration du système

Cliquez sur **Paramètres** sur la page d'accueil pour accéder à la page Configuration du système.

Note : Cette fonction n'est accessible que par la connexion Administrateur. Pour les connexions des utilisateurs, la fonction **Paramètres** est masquée et la page Configuration du système ne sera pas accessible.



Fig. 0.9 Paramètres : Page système

3.8.1 Système

Sur la page **Système**, l'administrateur peut saisir les informations relatives à l'établissement de soins de santé, choisir la langue du système, définir la date et l'heure du système et afficher les informations du système. Pour modifier la langue du système, cliquez sur **Sélectionner** derrière le champ de saisie de la langue et choisissez la langue de votre choix.



Fig. 0.10 Options de langue du système

Pour modifier la date et l'heure du système, cliquez sur l'onglet **Sélectionner** juste à côté du champ de saisie Date et définissez la date et l'heure appropriées.

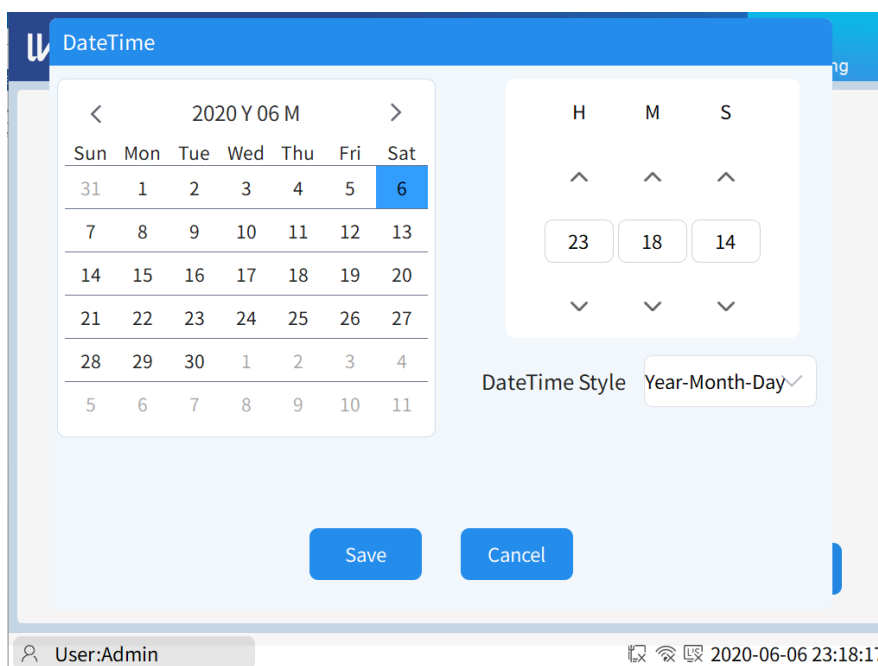


Fig. 0.11 Réglage de la date du système

En cliquant sur **À propos de** sur la page Système, les informations du système s'affichent.



Fig. 0.12 Page d'information sur le système

Sur la page Informations sur le système, l'administrateur peut exécuter une mise à jour du système en cliquant sur **Mise à jour du logiciel**. Le dernier logiciel sera stocké dans un pilote USB externe fourni par Wondfo. Après avoir cliqué sur le bouton **Mise à jour du logiciel**, le système vérifiera la dernière version du logiciel et commencera la mise

à jour si elle est disponible.

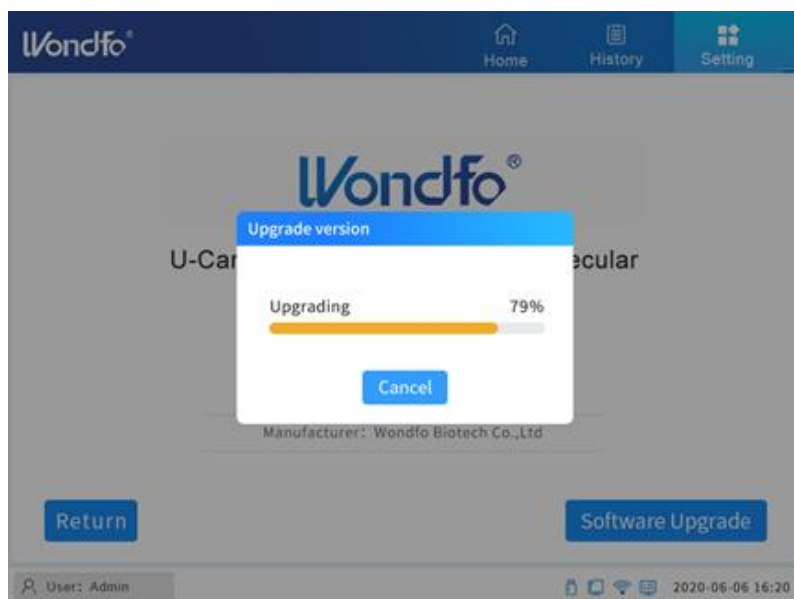


Fig. 0.13 Page de mise à jour du logiciel

3.8.2 Imprimer



Fig. 0.14 Page de configuration de l'impression

Contenu du rapport imprimé personnalisé : Le contenu du rapport personnalisable comprend le nom de l'établissement de santé, l'ID de l'échantillon, le nom du patient, l'utilisateur, le résultat du test, l'âge, la date du test, le sexe, la date de prélèvement de l'échantillon et le téléphone. L'administrateur peut créer des combinaisons en sélectionnant les cases à cocher. Seuls les éléments sélectionnés seront inclus dans le résultat imprimé du test. Par défaut, le résultat imprimé du test comprend uniquement

l'utilisateur, l'ID de l'échantillon, le résultat du test, la date du test et la date de prélèvement de l'échantillon.

3.8.3 Réseau

Appuyez sur le bouton Réseau dans le menu Système. L'instrument U-Card Dx propose trois options : WiFi, Serveur LIS, et Ethernet local.

3.8.3.1 Paramètres WiFi

Cliquez sur **WiFi** pour accéder à la page WiFi. L'administrateur peut activer ou désactiver la fonction WiFi en cliquant sur la barre coulissante.

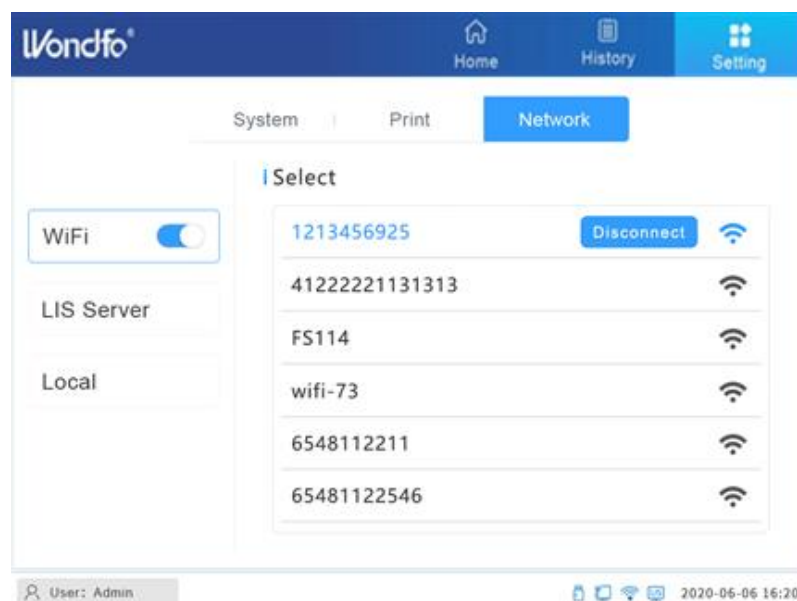


Fig. 0.15 Page de paramètres WiFi

Sélectionnez le réseau auquel vous voulez vous connecter dans la liste des noms de réseaux découverts. Cliquez sur **Connecter** ou **Déconnecter** pour activer ou désactiver la connexion réseau.

3.8.3.2 Paramètres du LIS

Cliquez sur **Serveur LIS** et accédez à la page Serveur LIS. L'utilisateur doit saisir l'adresse IP et le port pour établir la connexion. Consultez votre manager LIS pour plus de détails.

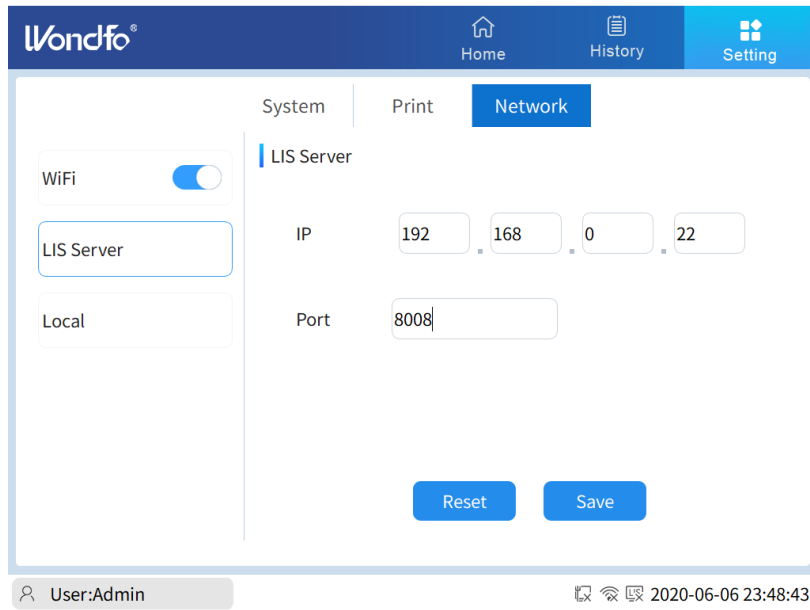


Fig. 0.16 Page de paramètres LIS

3.8.3.3 Paramètres locaux

Cliquez sur **Local** pour accéder à la page des paramètres locaux.

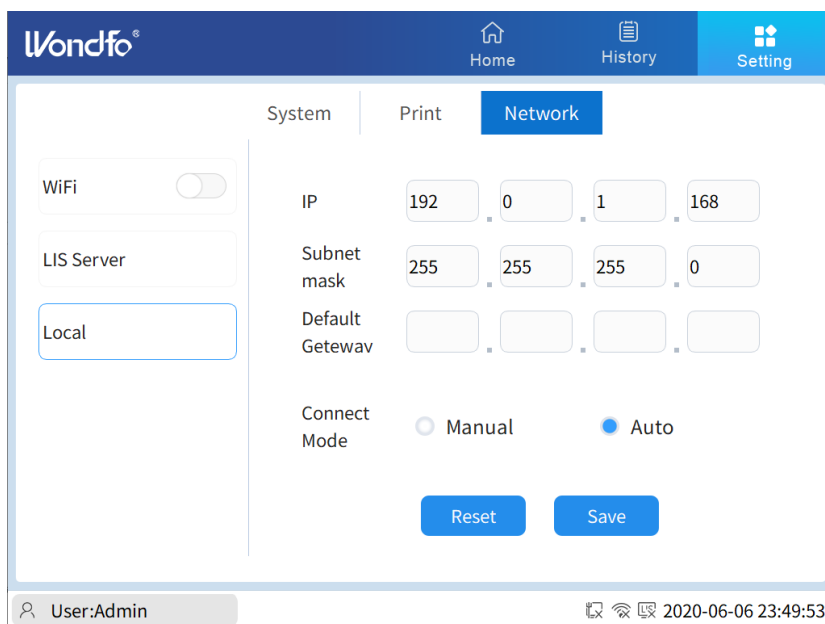


Fig. 0.17 Page de paramètres locaux

L'utilisateur peut saisir manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

Mode de connexion : Automatique ou manuel.

Mode de connexion automatique : Après avoir défini l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut, sélectionnez **Auto** et cliquez sur **Enregistrer**.

Mode de connexion manuel : Après avoir défini l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut, sélectionnez **Manuel** et cliquez sur **Enregistrer**.

3.9 Gestion des utilisateurs

Outre le compte Admin, il existe deux types de comptes d'utilisateur pour l'instrument : (i) **Utilisateur**, et (ii) **Superutilisateur**. Le tableau 3.6 énumère les différents niveaux d'accès.

Tableau 0.6 Niveau d'accès de l'opérateur

Fonction	Admin	Superutilisateur	Utilisateur
Paramètres du système	√	X	X
Effectuer un test d'échantillon	√	√	√
Effectuer un test CQ	√	√	√
Imprimer les rapports de résultats	√	√	√
Afficher l'historique des résultats	Afficher les résultats des tests effectués par tous les utilisateurs	Afficher les résultats des tests effectués par tous les utilisateurs	Afficher les résultats des tests effectués par l'utilisateur actuel
Changer le mot de passe (connexion actuelle)	√	√	√
Changer le mot de passe (autres connexions)	√	X	X
Ajouter/Supprimer des utilisateurs	√	X	X

La **Gestion des utilisateurs** n'est disponible que sous le compte Admin. En cliquant sur **Gestion des utilisateurs**, vous ouvrez la page Gestion des utilisateurs (Figure 0.20).

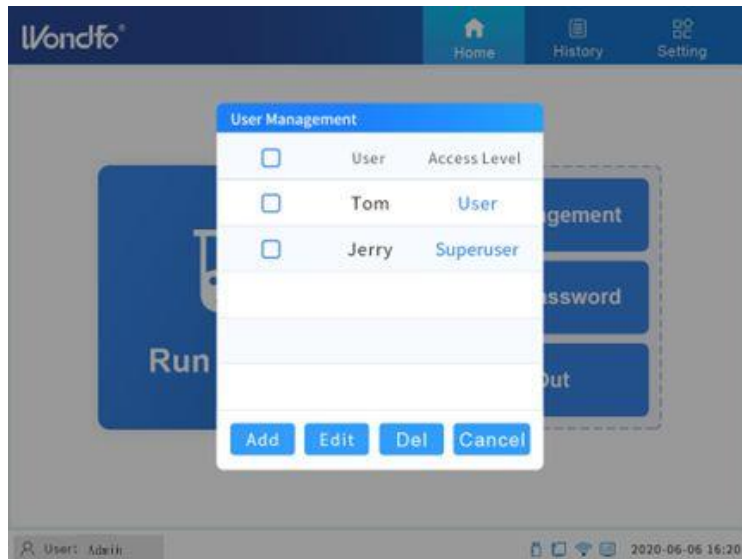


Fig. 0.18 Page Gestion des utilisateurs

Les onglets disponibles dans l'interface Gestion des utilisateurs exécutent les fonctions correspondantes comme suit :

Ajouter : Ajouter une nouvelle connexion d'utilisateur.

Editer : Editer le nom d'utilisateur, le mot de passe.

Del : Supprimer l'utilisateur.

Annuler : Retourner au menu précédent.

Cliquez sur Add pour ajouter un nouvel utilisateur, comme illustré à la Figure 0.19. L'administrateur peut spécifier le nom, le mot de passe et le niveau d'accès de l'utilisateur.

Le **Superutilisateur** et l'utilisateur NE PEUVENT PAS modifier les paramètres du système. L'**Utilisateur** est limité et ne peut voir que ses propres résultats de test. Le **Superutilisateur** a un accès complet aux résultats des tests effectués par tous les utilisateurs.

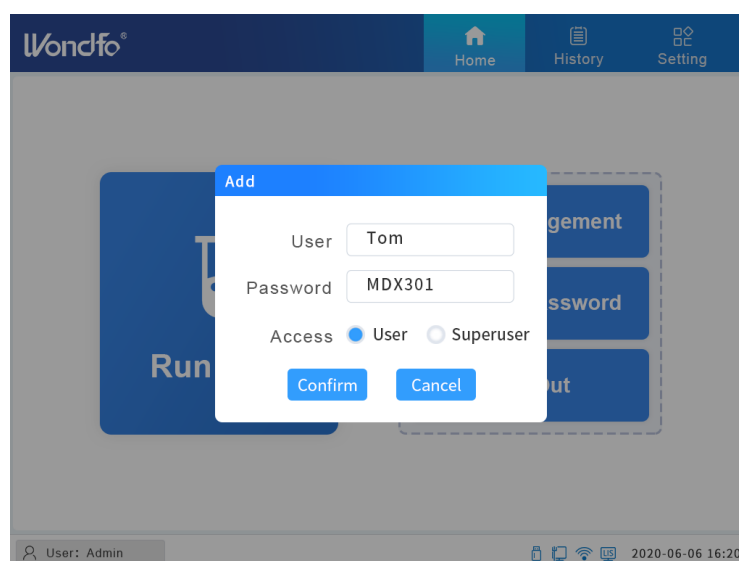


Fig. 0.19 Ajouter un nouvel utilisateur

Cliquez sur **Éditer** ; l'administrateur peut modifier le nom et le mot de passe de l'utilisateur, comme illustré à la Figure 3.22.

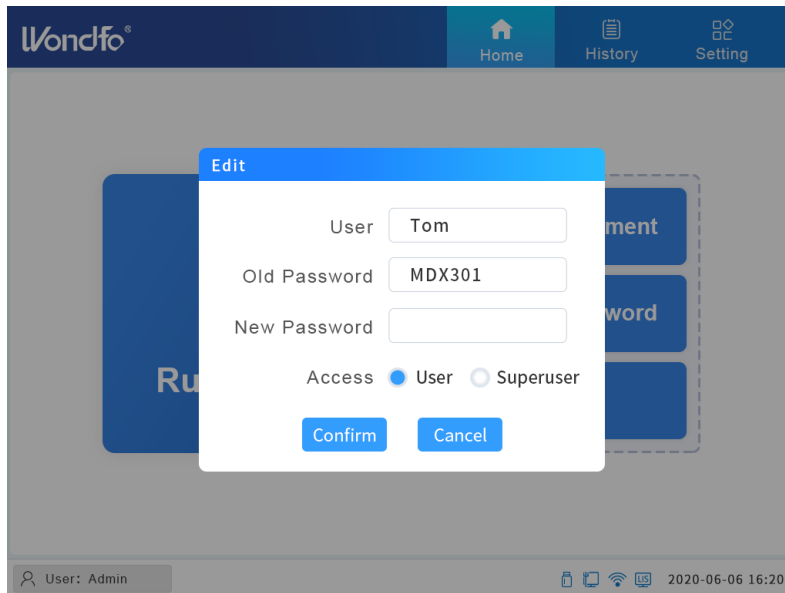


Fig. 0.20 Editer l'utilisateur

Cliquez sur **Modifier le mot de passe** sous **Gestion des utilisateurs** ; l'administrateur peut modifier le mot de passe de l'administrateur comme indiqué à la Figure 3.23.

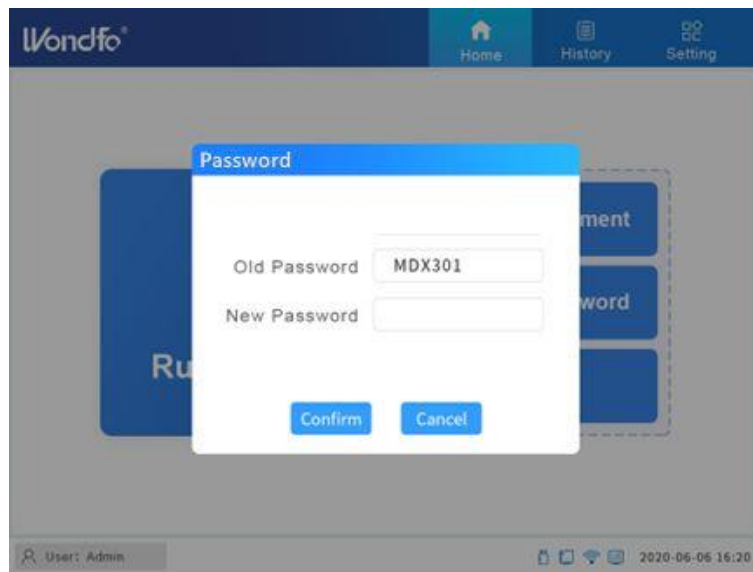


Fig. 0.21 Modifier le mot de passe

CHAPITRE 4: Procédure de test

4.1 Saisir les informations sur l'échantillon

Après la connexion, cliquez sur **Exécuter le test**. La page **Saisir l'ID de l'échantillon** s'affiche, comme illustré à la figure 4.1.

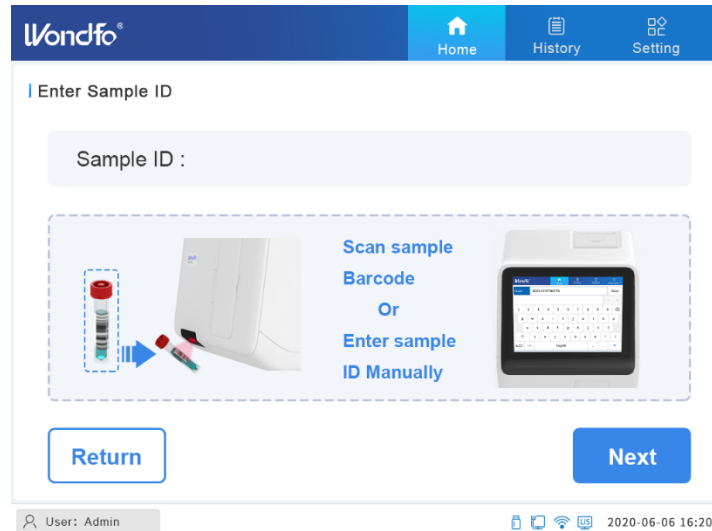


Fig. 0.1 Saisir l'ID de l'échantillon

4.1.1 Saisir l'ID de l'échantillon par code-barres

Suivez les instructions à l'écran. S'il y a un code-barres d'identification de l'échantillon, l'utilisateur peut scanner le code-barres pour saisir l'ID de l'échantillon. Pour scanner l'ID de l'échantillon, tenez le code-barres devant le scanner. Lorsque l'utilisateur entend un bip sonore, la numérisation est réussie et l'ID de l'échantillon s'inscrit automatiquement dans le champ ID de l'échantillon.

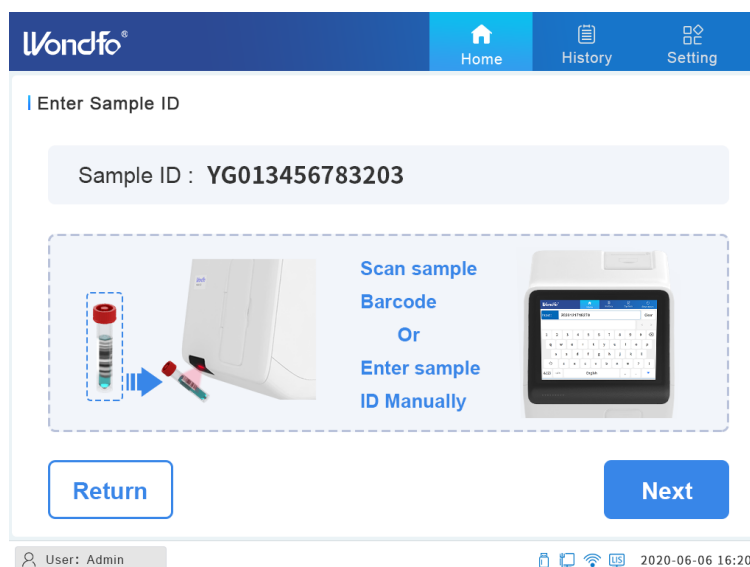


Fig. 0.2 Scanner le code-barres pour entrer l'ID de l'échantillon

4.1.2 Saisir manuellement l'ID de l'échantillon

Si l'échantillon n'a pas de code-barres ou si le scanner est incapable de lire le code-barres (aucun bip sonore n'est émis ou aucune information ne s'affiche), l'ID de l'échantillon peut être saisi manuellement. En cliquant sur le champ de saisie vide juste à côté de l'ID de l'échantillon, la page **Informations sur le patient**, comme indiqué dans la figure 4.3, s'affiche. L'utilisateur peut saisir l'ID de l'échantillon sur la première ligne.

Sur la page **Informations sur le patient**, un identifiant d'échantillon doit être rempli pour le test. Les autres informations, telles que l'âge, le nom, l'année, etc. sont en option. L'utilisateur peut choisir de remplir les champs ou de les laisser vides. En cliquant sur Enregistrer, les informations remplies sont associées au test en cours et l'utilisateur peut passer à la page SUIVANT (Figure 4.2). En cliquant sur **Retour**, vous retournez à la page Saisir l'ID de l'échantillon (Figure 4.1).

The screenshot shows the 'Patient Information' form in the Wondfo application. The form is titled 'Patient Information' and contains the following fields and options:

- Sample ID:** YG123456783203
- QC Test:**
- Name:** Bob Song
- Same as Sample ID:**
- Age:** 16
- Year:** Year (dropdown menu)
- Telephone:** 1765431238
- Gender:** Male (dropdown menu)
- Sample Collection Date:** 2020-06-05

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Return' and 'Save'. The user is identified as 'User:Admin' and the timestamp is '2020-06-06 22:47:48'.

Fig. 0.3 Saisir manuellement les informations sur le patient

4.2 Informations sur la cartouche à scanner

Une fois que l'ID de l'échantillon est rempli, cliquez sur **Suivant** pour passer à la page **Scanner la cartouche**.

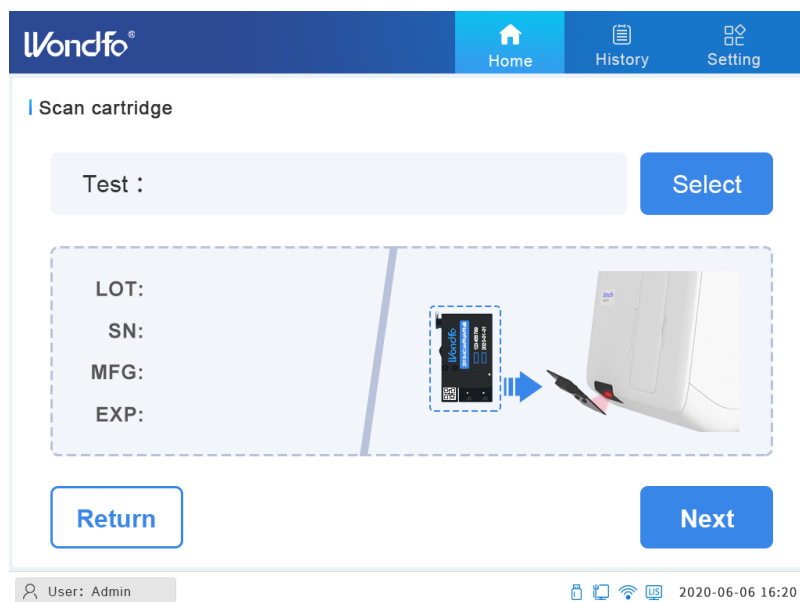


Fig. 0.4 Page Scanner la cartouche

4.2.1 Entrer les informations de la cartouche par code-barres

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Tenez la cartouche devant le scanner pour activer la fonction de scannage. L'instrument émet un bip lorsque le scannage de la cartouche est réussi. Les informations de test associées à cette cartouche s'affichent automatiquement à l'écran, comme le montre la Figure 4.5.



Fig. 0.5 Scanner la cartouche

4.2.2 Saisir manuellement les informations sur la cartouche

Si le scanner a un problème pour lire les informations de la cartouche, l'utilisateur peut cliquer sur **Sélectionner** et sélectionner manuellement le test approprié.

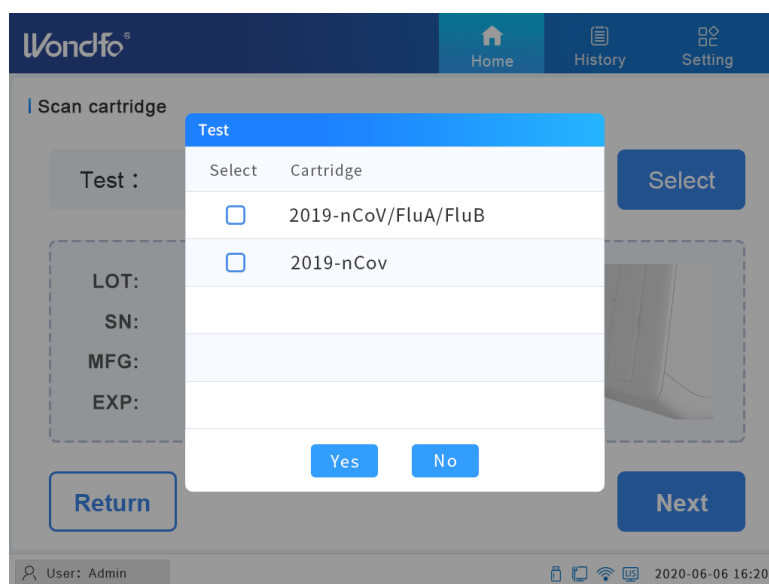


Fig. 0.6 Sélectionner manuellement le test

L'utilisateur peut sélectionner un test en cochant la case à côté du test de son choix. Ensuite, une boîte de dialogue d'avertissement de confirmation s'affiche pour s'assurer que le bon test a été sélectionné (Figure 4.7). En cliquant sur **Oui**, la figure 4.5 s'affiche avec les informations sur la cartouche.



Pour obtenir des résultats précis pour l'analyte prévu, le test sélectionné manuellement doit correspondre à l'étiquette de la cartouche dans laquelle l'échantillon a été ajouté.

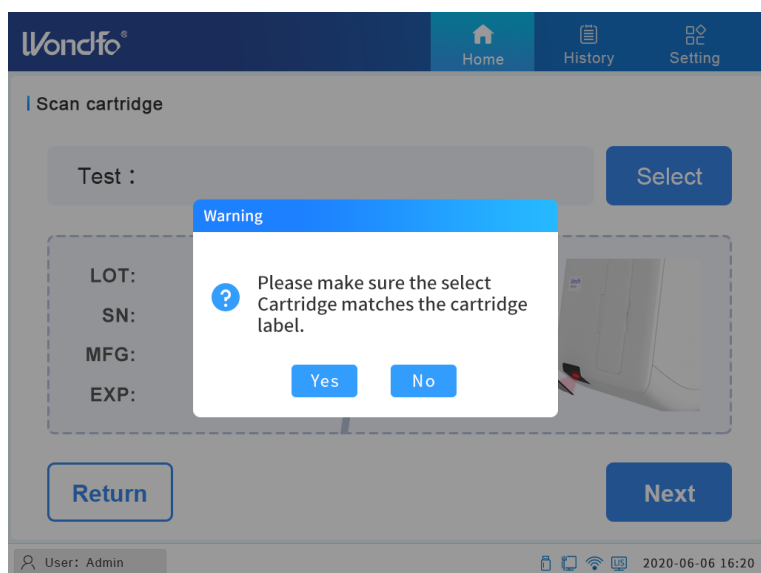


Fig. 0.7 Avertissement concernant la sélection manuelle de la cartouche de test

4.2.3 Chargement de l'échantillon dans la cartouche

Cliquez sur **Suivant** dans la Figure 4.5 pour passer à la page suivante, **Chargez l'échantillon dans la cartouche**, comme indiqué dans la Figure 4.8, suivez les

instructions et cliquez sur **Suivant**.

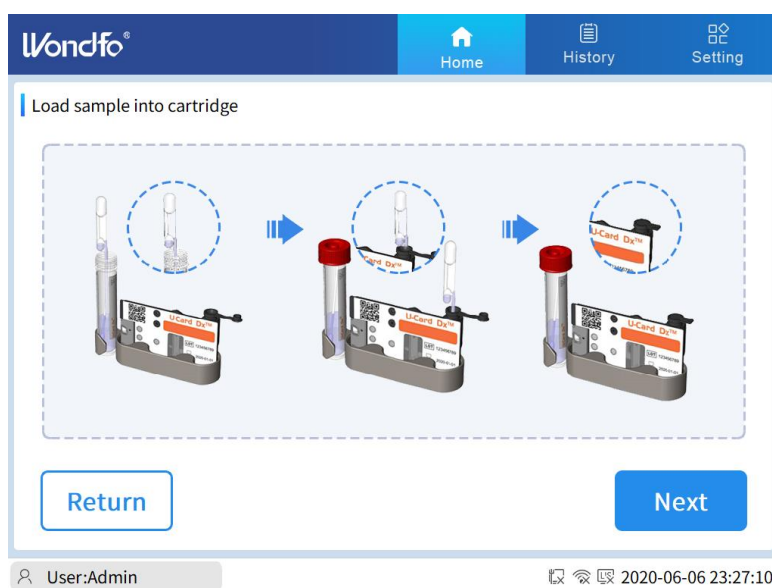


Fig. 0.8 Chargement de l'échantillon dans la cartouche

Suivez l'illustration de la Figure 4.9 pour insérer la cartouche dans l'instrument. Assurez-vous que la cartouche a été entièrement insérée dans le logement de la cartouche et fermez la porte de chargement de la cartouche. Cliquez sur **Démarrer** pour exécuter le test.

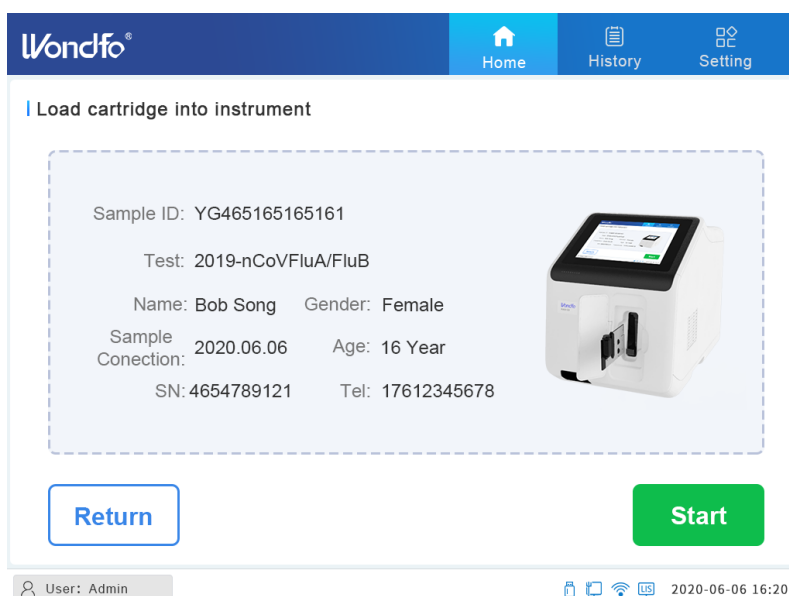


Fig. 0.9 Chargement de la cartouche dans l'instrument

4.3 Exécution du test

La Figure 0.10 montre l'écran Exécuter le test pour un test en cours. L'**ID de l'échantillon** et les informations sur le **test**, ainsi que le temps restant pour la cartouche actuelle, sont visibles sur l'écran Exécuter le test.

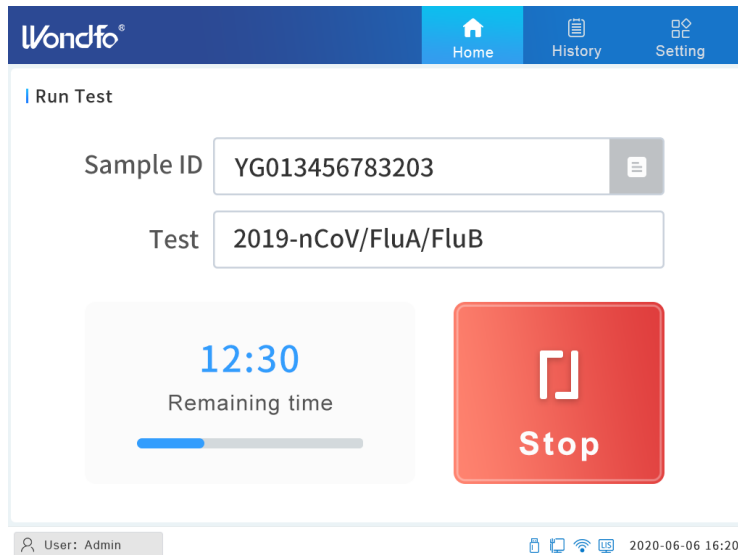


Fig. 0.10 Test en cours

Si l'utilisateur souhaite interrompre le test au milieu de l'exécution, cliquez sur l'icône **Arrêter**. Pour arrêter un test au milieu de l'exécution, l'utilisateur doit confirmer l'action en saisissant son mot de passe.

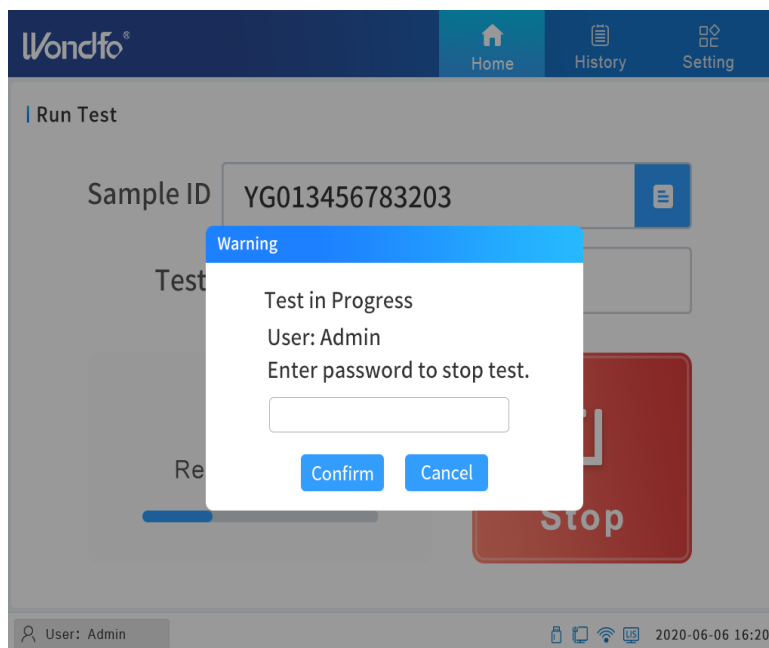


Fig. 0.11 Interrompre le test

Une fois le test terminé, le système affiche l'écran suivant pour indiquer que le test s'est déroulé avec succès et que les résultats du test sont disponibles.

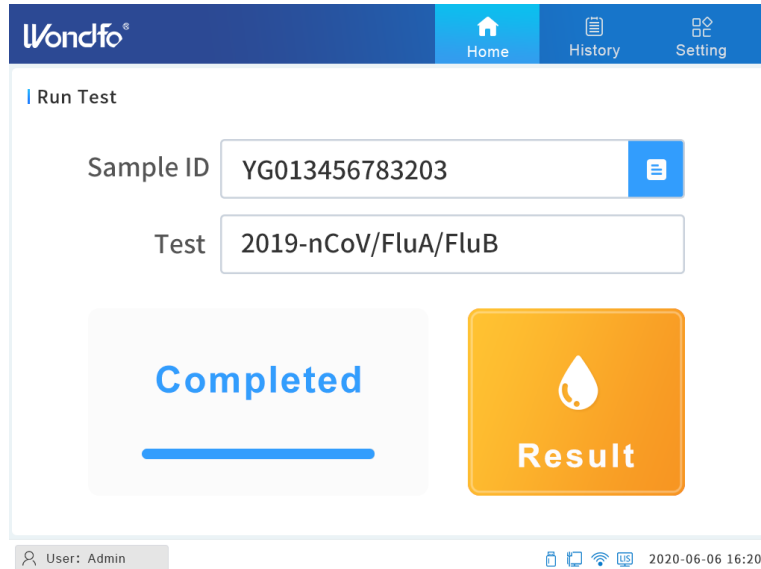


Fig. 0.12 Test complet

4.4 Vérification des résultats du test

4.4.1 Résultats du test actuel

Appuyez sur l'icône **Résultat** pour afficher les résultats du test. La page Résultat du test s'affiche (Figure. 4.13).



Fig. 0.13 Résultat du test

Le résultat du test peut être imprimé à partir de l'imprimante de l'instrument ou téléversé dans la base de données LIS de l'institution. La fenêtre affiche les résultats du test en bas, soit Positif, Négatif ou Invalide. Si le test est annulé, le résultat sera "Annulé", et si le test est en cours, le résultat sera "En cours". Si l'appareil est accidentellement mis

hors tension alors que le test est en cours, le résultat de ce test indiquera "En cours" dans l'enregistrement.

Cliquez sur l'icône **Courbe ACP** pour afficher la courbe et la valeur Ct, comme indiqué dans la Figure 4.14.

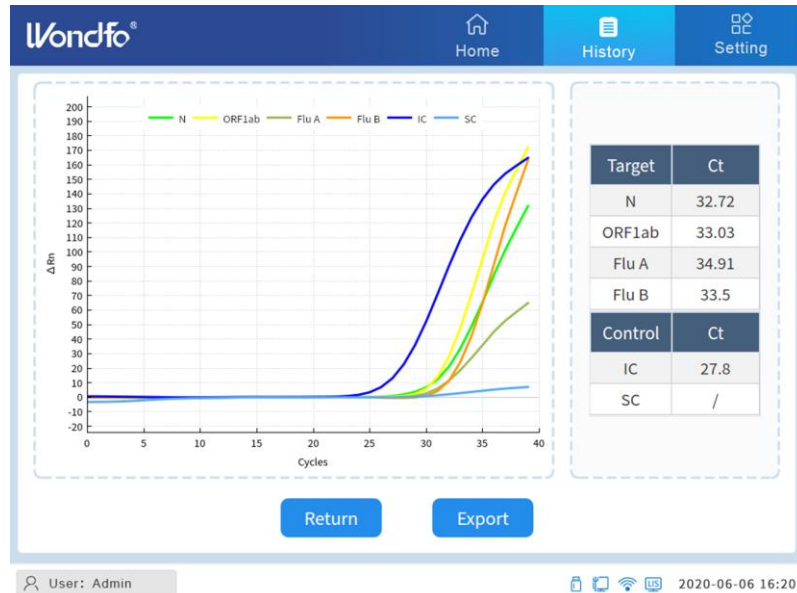


Fig. 0.14 Courbe et valeur Ct

CHAPITRE 5: Test de contrôle de la qualité (CQ)

Contrôles internes

Chaque cartouche U-Card Dx contient un contrôle interne de processus (IPC) qui subit les mêmes étapes de processus que l'échantillon du patient. Si le résultat de l'IPC ne répond pas aux critères de conformité, la cartouche de test sera invalide et aucun résultat de test ne sera rapporté.

Contrôle externe de qualité

Il peut être demandé aux utilisateurs d'effectuer le Test de contrôle externe de qualité , où des échantillons CQ d'un statut connu (échantillons positifs et négatifs) sont passés sur la cartouche de test. En général, le test de contrôle externe de qualité est effectué selon les règles ou les règlements d'un laboratoire. Wondfo fournit des échantillons CQ à la demande du client.

L'exécution d'un échantillon CQ externe suit les mêmes étapes que l'exécution d'un échantillon patient, comme décrit au **CHAPITRE 4**. Les utilisateurs doivent cocher la case **Test CQ** après la page de saisie de l'ID de l'échantillon (Figure 5.1), afin que le système puisse identifier qu'il s'agit d'un test CQ et qu'il enregistre les résultats dans l'**Enregistrement CQ**. Après avoir coché la case Contrôle CQ, les champs de saisie Nom, Age, Téléphone, Sexe et Date de prélèvement de l'échantillon seront grisés.



The screenshot shows the Wondfo software interface for entering patient information. The top navigation bar includes 'Wondfo', 'Home', 'History', and 'Setting'. The main section is titled 'Patient Information' and contains a dashed box with the following fields: 'Sample ID' (WF220120135255) with a checked 'QC Test' checkbox; 'Name' (empty) with a 'Same as Sample ID' checkbox; 'Age' (empty) with a 'Year' dropdown; 'Telephone' (empty); 'Gender' (empty) with a dropdown; and 'Sample Collection date' (empty). At the bottom of the form are 'Return' and 'Save' buttons. The footer shows 'User: Admin' and the date/time '2020-06-06 16:20'.

Fig. 5.1 Informations sur l'échantillon CQ

L'instrument affichera seulement Positif, Négatif ou Invalide sur la page des résultats CQ. L'utilisateur doit comparer ce résultat avec le résultat attendu de l'échantillon CQ

et prendre les mesures appropriées en accord avec les procédures CQ standardisées.



Fig. 5.2 Résultat du test CQ

Les résultats du contrôle externe CQ sont enregistrés dans l'onglet "**Enregistrement CQ**" sous "**Historique**" pour référence ultérieure.

CHAPITRE 6: Historique

L'instrument Wondfo U-Card Dx enregistre tous les résultats des tests. Appuyez sur **Historique** dans le menu principal pour afficher les résultats de test enregistrés. Il existe deux types d'enregistrements, les enregistrements de test (résultats des échantillons du patient) et les enregistrements CQ (résultats des échantillons CQ externes, décrits au **CHAPITRE 5**).

6.1 Enregistrements des tests

Pour lancer un nouveau test, cliquez sur le bouton **Accueil** en haut de l'écran pour revenir à la page d'accueil.

Après avoir cliqué sur le bouton **Historique**, la page **Enregistrements des tests** affichera l'Historique de la dernière exécution (effectuée par cet utilisateur).

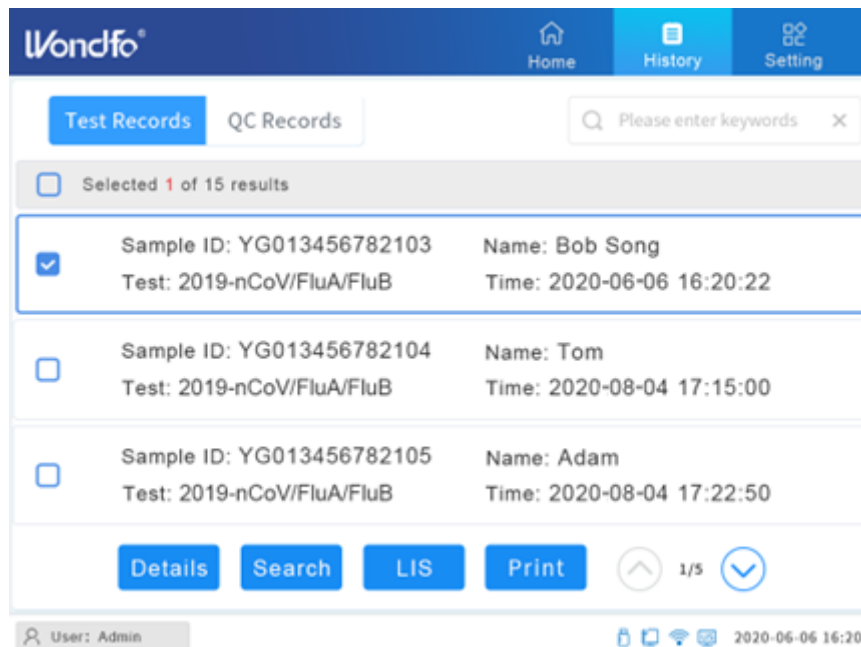



Fig. 0.1 Enregistrements des tests


Sélectionnez un enregistrement en cliquant sur la case à cocher au début de l'enregistrement. Les actions sur cette page sont énumérées ci-dessous.

Cliquez sur **Détails** pour afficher le rapport détaillé du test sélectionné.



Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer le rapport du test sélectionné.

Cliquez sur **LIS** pour téléverser le rapport du test sélectionné vers un système LIS.

Cliquez sur  pour voir la page précédente de Enregistrements des tests.

Cliquez sur  pour voir la page suivante des Enregistrements des tests.

Il existe deux méthodes de recherche :

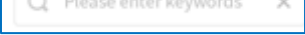1) La recherche rapide en haut à droite  permet de rechercher des résultats sur la base des mots-clés saisis, comme l'ID de l'échantillon, la durée du test, le nom, etc. L'utilisateur doit cliquer sur  pour effectuer une recherche.

2) Une recherche plus détaillée peut être effectuée à l'aide du bouton **Recherche** . En cliquant sur ce bouton, une page (Figure 6.2) s'affiche où l'utilisateur peut rechercher des résultats en fonction d'une plage de dates ou d'autres détails relatifs à l'échantillon.

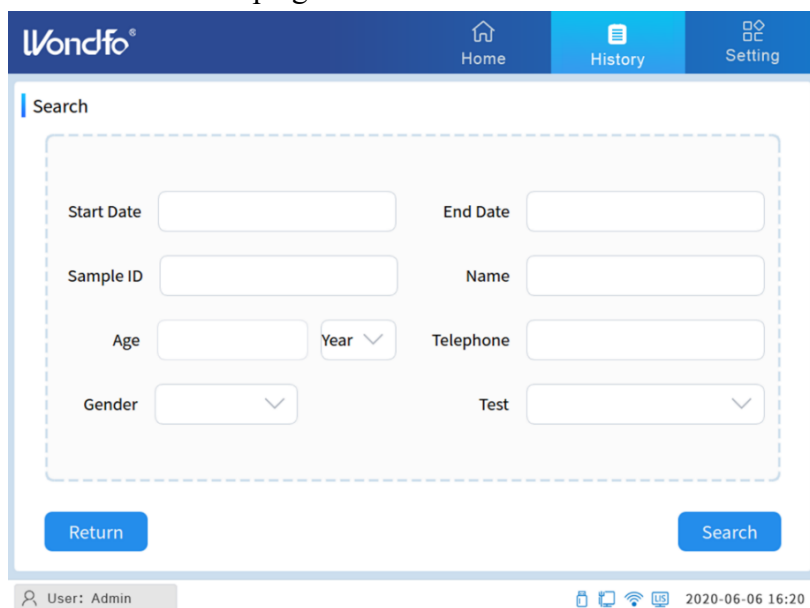


Fig. 0.2 Page Recherche

Dans la Figure 6.1, en sélectionnant l'enregistrement en surbrillance et en cliquant sur **Détails**, le rapport de test détaillé s'affiche, soit la même page que dans la Figure 4.13.

6.2 Enregistrements CQ

En cliquant sur **Enregistrements CQ**, les résultats du contrôle externe de qualité s'affichent.

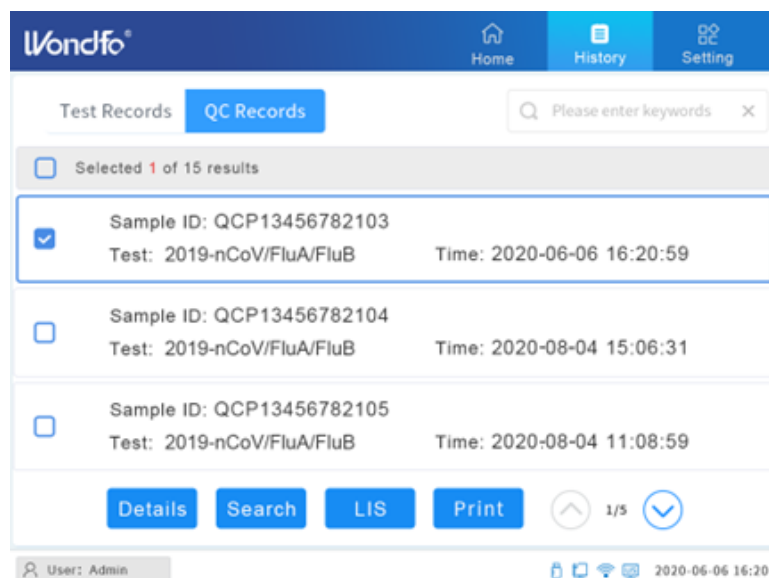


Fig. 0.3 Enregistrements CQ

Les actions de cette page sont les mêmes que celles de la page **Enregistrements des tests**.

Dans la figure 6.2, en sélectionnant le premier enregistrement et en cliquant sur **Détails**, le rapport des résultats du CQ s'affiche, soit la même page que dans la figure 5.2.

CHAPITRE 7: Entretien

Bien que l'instrument U-Card Dx soit conçu pour garantir des résultats précis avec un entretien minimal, il est recommandé de vérifier et de nettoyer l'instrument périodiquement à titre préventif.

Tableau 0.1 Entretien de l'instrument

Tâche	Fréquence	Section
Nettoyage des surfaces de l'instrument	Régulièrement	Section 7.1
Remplacement des filtres du ventilateur	Régulièrement	Section 7.2
Remplacement du fusible	En cas de besoin	Section 7.3
Entretien de l'imprimante	Régulièrement	Section 7.4

7.1 Nettoyage des surfaces de l'instrument

Nettoyage régulier de l'instrument U-Card Dx en suivant la procédure décrite ci-dessous :

1. Arrêtez le logiciel de l'instrument, éteignez le bouton d'alimentation de l'instrument et débranchez le câble d'alimentation.
2. Mouillez légèrement une lingette non pelucheuse avec une solution d'hypochlorite de sodium à 10% (ou équivalent).
3. Essuyez soigneusement les surfaces de l'instrument.
4. Éliminez la lingette non pelucheuse usagée conformément à la réglementation locale.
5. Attendez 10 minutes jusqu'à ce que la solution sèche.
6. Mouillez légèrement une lingette non pelucheuse avec une solution d'éthanol à 70% ou d'alcool isopropylique à 70%. Pour toute question, veuillez contacter le fabricant du détergent.
7. Essuyez les surfaces des instruments pour éliminer la solution d'hypochlorite de sodium séchée.
8. Éliminez la lingette non pelucheuse usagée conformément à la réglementation locale.



Évitez de mouiller excessivement l'instrument et de projeter du liquide dans les orifices d'aération de l'instrument.

7.2 Remplacement du filtre du ventilateur

Wondfo recommande de remplacer les filtres du ventilateur tous les six mois, ou lorsque le filtre est obstrué par des débris. Pour remplacer les filtres du ventilateur :

1. Mettez l'instrument hors tension, débranchez le câble d'alimentation.
2. Retirez le couvercle du filtre du ventilateur du panneau latéral.
3. Remplacez le filtre et remettez le couvercle sur le panneau latéral.

7.3 Remplacement du fusible

Wondfo recommande d'examiner et de remplacer le fusible si le système ne peut pas être mis sous tension :

1. Mettez l'instrument hors tension, débranchez le câble d'alimentation.
2. Trouvez la boîte à fusibles située sur le panneau d'interrupteurs d'alimentation (mise en évidence sur la figure 7.3).

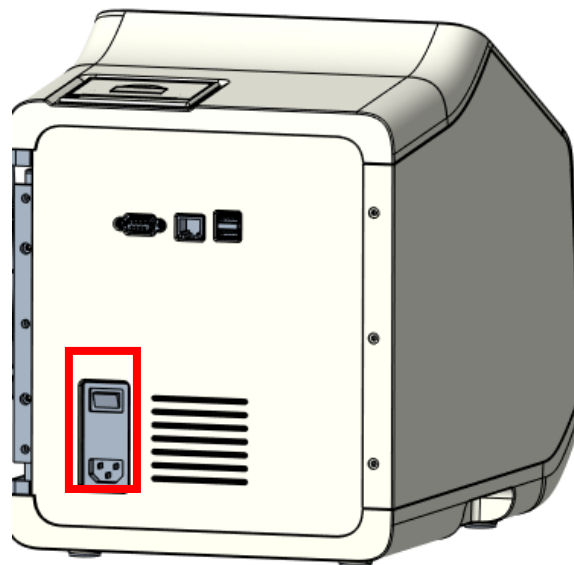


Fig. 0.3 Remplacer le fusible

3. Identifiez le fusible cassé.
4. Remplacez le fusible et installez la boîte à fusibles.
5. Testez le système.

7.4 Entretien de l'imprimante

Les taches et saletés résiduelles sur la tête d'impression thermique affectent la qualité d'impression. Il convient donc de nettoyer régulièrement la surface de la tête d'impression. Il est recommandé de le faire au moins une fois par mois ou à chaque fois que la qualité d'impression diminue.



Fig. 0.4 Imprimante

Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer la tête de l'imprimante :

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à papier de l'imprimante et retirez le rouleau de papier d'imprimante.
2. Essuyez délicatement la surface de la tête d'impression avec un chiffon propre non pelucheux trempé dans une petite quantité d'alcool à 70 % ou d'alcool isopropylique. La tête d'impression est une longue surface métallique qui se trouve au fond du compartiment.
3. Après avoir séché l'alcool résiduel de la surface de la tête d'impression, remplacez le rouleau de papier d'impression dans le compartiment à papier de l'imprimante et fermez le couvercle.



Immédiatement après l'impression, la tête d'impression thermique est très chaude. N'ouvrez pas le compartiment à papier de l'imprimante, ne touchez pas la surface de la tête d'impression et ne tentez pas de la nettoyer avant qu'elle ne refroidisse (généralement 30 minutes après la dernière impression, mais cela peut varier en fonction des conditions ambiantes).

7.5 Vie du produit

L'instrument U-Card Dx a une durée de vie de cinq ans dans des conditions normales d'utilisation.

7.6 Élimination

À la fin du cycle de vie du produit, éliminez le produit conformément aux ordonnances et règlements locaux.

7.7 Calibration de l'instrument

L'instrument U-Card DX ne nécessite pas de calibration initiale de la part de l'utilisateur, car les processus de calibration et de vérification sont effectués sur l'instrument lors de sa fabrication.

Il est recommandé aux utilisateurs d'effectuer des contrôles de performance en cas de transport de l'instrument, de changement d'environnement ou de situations similaires.

CHAPITRE 8: Dépannage

Ce CHAPITRE énumère les problèmes et les messages d'erreur qu'un utilisateur peut rencontrer pendant le fonctionnement de l'instrument.

8.1 Problèmes de matériel

Le tableau 8-1 énumère les Problèmes de matériel que l'utilisateur peut rencontrer. Pour contacter le support technique, reportez-vous au “ *CHAPITRE 10 : Contact* ”

Tableau 0.1 Problèmes de matériel

Problème	Cause possible	Solution
L'instrument ne démarre pas	Panne d'alimentation	Vérifiez si le câble d'alimentation est branché ou non
	Mauvaise connexion entre le câble d'alimentation et le port d'alimentation	Tirez sur le câble et rebranchez-le fermement.
	L'interrupteur principal est éteint	Pousser l'interrupteur en position de marche
	Le fusible a sauté	Changer le fusible (voir les spécifications, page 12)
La LED du panneau avant est rouge après la mise sous tension	Panne du matériel optique	Contactez le support technique de Wondfo
	Panne matérielle thermique	
	Panne électronique	
Le scanner de codes-barres ne fonctionne pas	La surface de la cartouche est sale	Nettoyer la zone du code QR de la cartouche et rescanner le code-barres.
	Le scanner est en panne	Contactez le support technique de Wondfo
	La surface du scanner est sale	Nettoyez la surface du scanner et rescanner le code-barres.
	Le format du code-barres n'est pas reconnu	Saisir manuellement les informations
Panne d'imprimante	L'imprimante thermique ne peut pas imprimer automatiquement	Ouvrez le couvercle du bac à papier de l'imprimante thermique, redressez le papier d'impression ou retirez le

Problème	Cause possible	Solution
		papier coincé, refermez le couvercle du bac à papier de l'imprimante et cliquez sur imprimer à nouveau.
	Manque de papier	Rechargez le papier
Défaut de communication	Impossible de se connecter à Internet via le WIFI intégré.	Vérifiez que la puissance du réseau sans fil et les paramètres réseau dans les paramètres du système sont corrects.
	Impossible de communiquer avec le système LIS	Vérifiez si la connexion réseau ou WiFi est réussie, puis vérifiez si les paramètres IP du système LIS dans l'élément Paramètres du système sont corrects.
Échec de la connexion	Nom d'utilisateur ou mot de passe erroné	Si un utilisateur général oublie son nom d'utilisateur et son mot de passe, contactez l'administrateur système. Si l'administrateur du système oublie le nom d'utilisateur et le mot de passe, contactez le support technique de Wondfo.
Le bruit du ventilateur devient plus fort	Le filtre est obstrué par des débris	Remplacer le filtre du ventilateur (voir la section 7.2).
L'écran tactile ne répond pas aux entrées de l'utilisateur	Problème de logiciel ou de matériel	Redémarrez l'appareil, si le problème persiste, contactez le support technique de Wondfo.
Perte de puissance au milieu d'un test	Câble d'alimentation desserré ou fusible fondu	Régalez le câble d'alimentation et redémarrez l'instrument. En cas d'échec, remplacez le fusible et redémarrez l'instrument. Recommencez le test en utilisant une nouvelle cartouche.

8.2 Messages d'erreur

Si un message d'erreur s'affiche à l'écran, veuillez consulter les tableaux ci-dessous pour connaître les causes et les solutions possibles. Les Messages d'erreur sont regroupés par catégories.

8.2.1 Erreurs de communication

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
1	ERREUR 1 : L'appareil a perdu la communication, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Erreur d'allocation de mémoire.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
9	ERREUR 9 : Impossible de démarrer le test, veuillez consulter le manuel d'utilisation	Le test précédent n'est pas terminé ou le dispositif a perdu la communication	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
10	ERREUR 10 : Arrêt du test échoué, veuillez consulter le manuel d'utilisation	Le dispositif a perdu la communication.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
11	ERREUR 11 : l'exécution de la commande a échoué, veuillez consulter le manuel d'utilisation	Le dispositif a perdu la communication.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
17	ERREUR 17 : Le dispositif a perdu la communication, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Une faible tension d'entrée provoque la réinitialisation de la carte moteur.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
			Wondfo.
19	ERREUR 19 : Le dispositif a perdu la communication, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Erreur de la minuterie Watchdog	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
20	ERREUR 20 : Le dispositif a perdu la communication, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Erreur de verrouillage de la mémoire.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
22	ERREUR 22 : Le dispositif a perdu la communication, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Erreur d'accès à la carte moteur.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
23	ERREUR 23 : Le dispositif a perdu la communication, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Erreur Boot.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
24	ERREUR 24 : Le dispositif a perdu la communication, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Erreurs MCU	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
25	ERREUR 25 : Le dispositif a perdu la communication,	Erreur du système d'exploitation	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
	veuillez vérifier le manuel d'utilisation		reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
26	ERREUR 26 : Le dispositif a perdu la communication, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Autres erreurs	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.

8.2.2 Erreur de commande du moteur

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
275	ERREUR 275 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	La commande du moteur n'a pas pu être exécutée car le conducteur du moteur est occupé.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
276	ERREUR 276 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	La commande du moteur a expiré.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
278	ERREUR 278 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel	Paramètres anormaux du moteur	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
	d'utilisation		support technique de Wondfo.
279	ERREUR 279 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	La commande du moteur ne peut pas être exécutée par la carte moteur.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
283	ERREUR 283 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	erreur de compensation de moteur	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
284	ERREUR 284 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	erreur de paramètre moteur	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
285	ERREUR 285 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Perte de pas du moteur détectée sur le conducteur du moteur (Phase A)	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit ou si l'appareil commence à produire des bruits inhabituels, contactez le support technique de Wondfo.
286	ERREUR 286 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Perte de pas du moteur détectée sur le conducteur du moteur (phase B)	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit ou si l'appareil commence à produire des bruits inhabituels, contactez le support

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
			technique de Wondfo.
287	ERREUR 287 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Courant élevé détecté sur le moteur.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit ou si l'appareil commence à produire des bruits inhabituels, contactez le support technique de Wondfo.
288	ERREUR 288 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Faible tension détectée sur le moteur.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit ou si l'appareil commence à produire des bruits inhabituels, contactez le support technique de Wondfo.
291	ERREUR 291 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Erreur de position de Réinitialisation (Moteur 4).	Contactez le support technique de Wondfo.
292	ERREUR 292 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Temps de réinitialisation du moteur 1 expiré.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit ou si l'appareil commence à produire des bruits inhabituels, contactez le support technique de Wondfo.
293	ERREUR 293 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Temps de réinitialisation du moteur 2 expiré.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit ou si l'appareil commence à produire

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
			des bruits inhabituels, contactez le support technique de Wondfo.
294	ERREUR 294 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Temps de réinitialisation du moteur 3 expiré.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit ou si l'appareil commence à produire des bruits inhabituels, contactez le support technique de Wondfo.
295	ERREUR 295 : Commande du moteur en panne, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Temps de réinitialisation du moteur 4 expiré.	Redémarrez l'appareil. Si l'erreur se reproduit ou si l'appareil commence à produire des bruits inhabituels, contactez le support technique de Wondfo.

8.2.3 Erreurs du module TEC

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
513	ERREUR 513 : Le contrôle de la température a échoué, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Défaillance de la communication du module TEC	Redémarrez l'appareil, Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
514	ERREUR 514 : Le contrôle de la température a échoué, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Erreur du module TEC.	Redémarrez l'appareil, Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
515	ERREUR 515 : Le contrôle de la température a échoué, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Température excessive du module ACP	Redémarrez l'appareil, Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
517	ERREUR 517 : Le contrôle de la température a échoué, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	État du module TEC anormal	Redémarrez l'appareil, Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
523	ERREUR 523 : Le contrôle de la température a échoué, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Différence de température entre deux capteurs du module TEC.	Redémarrez l'appareil, Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
524	ERREUR 524 : Le contrôle de la température a échoué, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Défaut de communication entre le module TEC et la carte moteur.	Redémarrez l'appareil, Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.

8.2.4 Erreur du module optique

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

769	ERREUR 769 : Le dispositif a perdu la communication, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	La carte optique ne peut pas être mise à jour ou la connexion du câble est défectueuse (carte moteur à la carte optique).	Redémarrez l'appareil, Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
-----	--	---	--

8.2.4 Erreurs du module Lysis

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
1027	ERREUR 1027 : Le chauffage par lysis a échoué, veuillez vérifier le manuel d'utilisation.	La température du Réchauffeur-1 dépasse le seuil fixé	Contactez le support technique de Wondfo.
1028	ERREUR 1028 : Le chauffage par lysis a échoué, veuillez vérifier le manuel d'utilisation.	La température du Réchauffeur-2 dépasse le seuil fixé	Contactez le support technique de Wondfo.
1029	ERREUR 1029 : Le chauffage par lysis a échoué, veuillez vérifier le manuel d'utilisation.	La température augmente trop lentement.	Contactez le support technique de Wondfo.
1030	ERREUR 1030 : Le chauffage par lysis a échoué, veuillez vérifier le manuel d'utilisation.	Défaillance du composant Lysis (Réchauffeur-2). Elévation de température non détectée dans le Réchauffeur-2.	Contactez le support technique de Wondfo.
1031	ERREUR 1031 : Le chauffage par lysis a échoué, veuillez	Défaillance du composant Lysis (Réchauffeur 1).	Contactez le support technique de Wondfo.

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
	vérifier le manuel d'utilisation.	Chute de température détectée < X°C après le chauffage du réchauffeur 1.	
1032	ERREUR 1032 : Le chauffage par lysis a échoué, veuillez vérifier le manuel d'utilisation.	Défaillance du composant Lysis (Réchauffeur 2). Chute de température détectée < X°C après le chauffage du réchauffeur 2.	Contactez le support technique de Wondfo.
1033	ERREUR 1033 : Les capteurs Lysis affichent une différence de température, veuillez vérifier le manuel d'utilisation.	Défaillance du composant Lysis (Réchauffeur 1). Écart de température > X°C entre deux capteurs du réchauffeur 1.	Contactez le support technique de Wondfo.
1034	ERREUR 1034 : Les capteurs Lysis ont un problème, veuillez vérifier le manuel d'utilisation.	Défaillance du composant Lysis (Réchauffeur 2). Écart de température > X°C entre deux capteurs du réchauffeur 2.	Contactez le support technique de Wondfo.
1035	ERREUR 1035 : Le chauffage par lysis a échoué, veuillez vérifier le manuel d'utilisation.	Défaillance du composant Lysis (Réchauffeur 1). Température du réchauffeur 1 > température de consigne + X°C	Contactez le support technique de Wondfo.
1036	ERREUR 1036 : Le chauffage par lysis a échoué, veuillez	Défaillance du composant Lysis (Réchauffeur 2).	Contactez le support technique de Wondfo.

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
	vérifier le manuel d'utilisation.	Température du réchauffeur 2 > température de consigne + X°C	

8.2.5 Erreurs UI

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
1285	ERREUR 1285 : UI ne répond pas, veuillez vérifier le manuel d'utilisation.	Expiration du délai de communication	Redémarrez l'appareil et recommencez le test. Recommencez le test en utilisant une nouvelle cartouche. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
1286	ERREUR 1286 : La date semble être incorrecte, veuillez vérifier le manuel d'utilisation.	1. Erreur du système 2. Niveau de batterie faible	Réglez la date et l'heure manuellement. Redémarrez l'appareil. Si le problème se reproduit, appelez le support technique de Wondfo..

8.2.6 Erreurs post analyse

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
1537	ERREUR 1537 : Courbe anormale, veuillez vérifier le manuel d'utilisation.	Erreur logicielle : nombre de cycles d'entrée < 15.	Recommencez le test en utilisant de nouvelles cartouches. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.

1538	ERREUR 1538 : Courbe anormale, veuillez vérifier le manuel d'utilisation.	Erreur logicielle : Valeur Ct < 5	Redémarrez l'appareil, Recommencez le test en utilisant de nouvelles cartouches. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
1539	ERREUR 1539 : Courbe anormale, veuillez vérifier le manuel d'utilisation.	Les signaux des 10 premiers cycles ACP sont significativement inférieurs à la ligne de base. Le mélange magnétique peut ne pas être alimenté.	Recommencez le test en utilisant de nouvelles cartouches. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
1540	ERREUR 1540 : Courbe anormale, veuillez vérifier le manuel d'utilisation.	Certains cycles ont une valeur brute < 5. Problème matériel ou logiciel potentiel.	Contactez le support technique de Wondfo.

8.2.7 Erreurs de chargement de l'échantillon

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
1793	ERREUR 1793 : Erreur d'insertion de la cartouche. Vérifiez manuellement l'insertion de la cartouche.	Pression de la chambre Lysis < 1,0 psi ou > 3 psi. La cartouche n'est probablement pas insérée correctement.	Assurez-vous que la cartouche est insérée à fond dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Assurez-vous que la porte est complètement fermée. Recommencez le test. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
1797	ERREUR 1797 : Erreur de chargement de l'échantillon, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Pas de liquide dans la chambre ACP-1. Un ou plusieurs des éléments suivants peuvent avoir causé l'erreur : 1. Une quantité incorrecte d'échantillon a été ajoutée dans la cartouche. 2. Cartouche défectueuse 3. Défaillance du transfert de fluide	Recommencez le test en utilisant une nouvelle cartouche. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
1798	ERREUR 1798 : Erreur de chargement de l'échantillon, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Pas de liquide dans la chambre ACP-2. Un ou plusieurs des éléments suivants peuvent avoir causé l'erreur : 1. Une quantité incorrecte d'échantillon a été ajoutée dans la cartouche. 2. Cartouche défectueuse 3. Défaillance du transfert de fluide	Recommencez le test en utilisant une nouvelle cartouche. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.

Code d'erreur	Message d'erreur	Cause	Solution
1799	ERREUR 1799 : Erreur de chargement de l'échantillon, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Cartouche usagée détectée dans la chambre 1	Recommencez le test en utilisant une nouvelle cartouche. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.
1800	ERREUR 1800 : Erreur de chargement de l'échantillon, veuillez vérifier le manuel d'utilisation	Cartouche usagée détectée dans la chambre 2	Recommencez le test en utilisant une nouvelle cartouche. Si l'erreur se reproduit, contactez le support technique de Wondfo.

CHAPITRE 9: Bibliographie

- [1] K. Mullis, F. Faloona, S. Scharf, R. Saiki, G. Horn et H. Erlich. Amplification enzymatique spécifique de l'ADN in vitro : la réaction en chaîne par polymérase. Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol., 1986, 51, 263–273.
- [2] F. F. Chehab et Y. W. Kan. Détection de séquences d'ADN spécifiques par amplification fluorescente : essai de complémentation en couleur. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1989, 86, 9178–9182.
- [3] F. Osman, E. Hodzic, A. Omanska-Klusek, T. Olineka et A. Rowhani. Développement et validation du test ACP quantitatif multiplex pour la détection rapide du virus de la vigne A, B et D. J. Virol. Methods, 2013, 194, 138–145.
- [4] Y. Kim, Y. Choi, B.-Y. Jeon, H. Jin, S.-N. Cho et H. Lee. Un test ACP multiplex simple et efficace pour l'identification du genre Mycobacterium et du complexe Mycobacterium tuberculosis au niveau de l'espèce. Yonsei Med. J., 2013, 54, 1220–1226.
- [5] J. F. Mehrabadi, P. Morsali, H. R. Nejad et A. A. Imani Fooladi. Détection de Vibrio cholerae toxigène avec une nouvelle méthode ACP multiplex. J. Infect. Public Health, 2012, 5, 263–267.
- [6] A. M. Caliendo, D. N. Gilbert, C. Ginocchio, et al. De meilleurs tests, de meilleurs soins : amélioration du diagnostic des maladies infectieuses. Clin Infect Dis. 2013;57 Suppl 3:S139-70. PMID: 24200831.
- [7] K. Basile, J. Kok, D. E. Dwyer. Diagnostic de l'infection virale des voies respiratoires. Expert Rev Mol Diagn. 2018;18:75-83. PMID: 29251007.

CHAPITRE 10: Contact

Les garanties explicites et implicites de Guangzhou Wondfo Biotech sont conditionnées par le respect total des instructions publiées par le fabricant concernant l'utilisation des produits de Guangzhou Wondfo Biotech. En aucun cas, Guangzhou Wondfo Biotech ne pourra être tenue responsable de tout dommage indirect ou consécutif.

Pour obtenir une assistance technique, veuillez nous appeler ou nous envoyer un courriel :



Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
8 Rue Lizhishan, Cité des Sciences,
District Luogang, 510663 Guangzhou, Chine
Tél: (+86) 400-830-8768
Site web : en.wondfo.com.cn
E-mail: Sales@wondfo.com.cn



Qarad BV
Cipalstraat 3
2440 Geel
Belgium