

## Composants

1 Collecteur de voile vaginal

2 Tube avec milieu de transport



B) Applicateur



A) Voile



## Instructions


1 Inscrivez vos données personnelles sur l'autocollant du sac.




2 Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon avant d'ouvrir le kit.




3 Ouvrir le kit, prendre le composant 1, à l'intérieur il y a le voile et l'applicateur (ne pas séparer ces composants avant de les introduire dans le vagin).

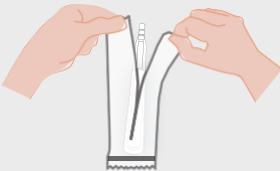

4 Après avoir atteint une position confortable et sans retirer l'applicateur, introduire le voile dans le vagin en laissant la partie terminale en forme de V à l'extérieur (cette partie servira à retirer le voile après son utilisation). Une fois que le voile est à l'intérieur, retirez l'applicateur et laissez le voile à l'intérieur du vagin et commencez à compter le temps.

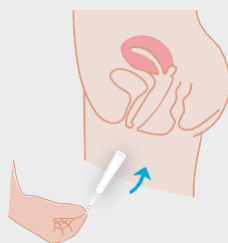

5 Le voile doit rester sur le vagin au minimum 5 minutes et au maximum 30. Assurez-vous que la partie terminale en forme de V du voile reste en dehors du vagin.

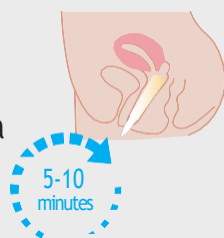

6 Pendant ces 5 à 10 minutes, vous pouvez effectuer n'importe quel mouvement.




7 Après ces 5-10 minutes, lavez-vous à nouveau les mains.




8 Placez le tube avec le milieu de transport à l'envers sur une surface plane (ne fermez pas le tube avant d'avoir inséré le voile). Veillez à ne pas faire tomber le liquide contenu dans le tube.



9 Retirez le voile du vagin en utilisant la partie terminale en forme de V. Ne touchez aucune surface avec le voile.

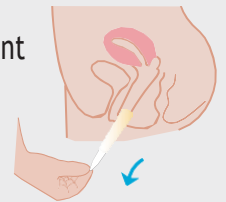

10 Insérez le voile dans le flacon fourni. Fermez le tube en vissant correctement le bouchon et retournez le tube trois fois jusqu'à ce que tout le voile soit imbibé de liquide. Une fois le tube correctement fermé, n'essayez pas de l'ouvrir à nouveau.

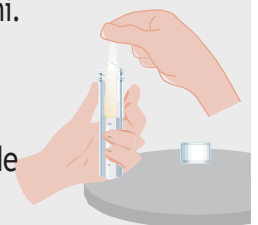

11 Placez le tube dans le petit sac à fermeture zippée, puis dans le grand sac avec l'étiquette de données.



12 Renvoyez le kit fermé au médecin, à l'hôpital ou à la clinique qui vous l'a fourni, dans un délai inférieur à 24 heures ou conservez-le entre 2 et 8 °C jusqu'à sa livraison éventuelle.



## QUAND CE KIT PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ ?

Ce kit est conçu pour prélever des échantillons de la cavité vaginale sans nécessiter l'intervention d'un professionnel de la santé.

Cet échantillon peut être utilisé pour le diagnostic *in vitro* d'une infection par divers pathogènes tels que le virus du papillome humain (HPV).

## TRÈS IMPORTANT :

Détendez-vous et choisissez la position la plus confortable pour vous (assise avec les jambes écartées, debout avec une jambe levée, ou debout avec les jambes légèrement fléchies). Séparez les lèvres situées à l'entrée du vagin. Introduisez délicatement le voile avec son applicateur.

Continuez à pousser le voile et l'applicateur vers la zone de préhension. La partie terminale en forme de V doit pendre librement à l'extérieur du vagin. Après avoir introduit le voile, retirez l'applicateur du vagin.

## ATTENTION :

Pour retirer l'applicateur, tirez légèrement dessus en faisant attention à ne pas tirer sur le voile. Jetez l'applicateur usagé avec les déchets ménagers normaux. En fonction de la taille du vagin et de la manière dont le voile intravaginal a été inséré, il est obligatoire que la partie terminale en forme de V reste visible afin de pouvoir être retirée après utilisation.

## COMMENT ENLEVER LE VOILE ?

Lavez-vous les mains et séchez-les avec un chiffon propre.

Détendez-vous et choisissez la position qui vous convient le mieux (assise avec les jambes écartées, debout avec une jambe levée ou avec les jambes pliées). Le voile s'enlève facilement en tirant sur la partie en forme de V. Insérez le voile dans le tube supplémentaire fourni. Utilisez le bouchon pour visser le tube et le fermer correctement. Une fois qu'il est bien fermé, n'essayez pas de l'ouvrir à nouveau.

## DES RECOMMANDATIONS ET DES CONSEILS :

- Lavez-vous correctement les mains avant d'utiliser ce dispositif médical.
- Ne pas utiliser si vous avez eu une activité sexuelle au cours des 2 derniers jours.
- Ne pas utiliser si vous avez fait un lavage vaginal dans les dernières 48 heures.
- Si vous êtes enceinte ou si vous avez du sang dans la cavité vaginale, n'utilisez ce dispositif médical que sous la recommandation de votre médecin.
- Le voile ne peut et ne doit pas rester dans le vagin plus de 30 minutes, mais si vous oubliez de l'enlever, retirez-le dès que vous vous en souvenez.
- N'utilisez qu'un seul voile à la fois.
- Ne pas réutiliser le voile, même s'il n'est pas imprégné de fluides corporels.
- Pour plus de recommandations, demandez à votre médecin, à votre gynécologue ou à votre pharmacien.
- Ne buvez pas le liquide contenu dans le tube.
- Ne laissez pas le liquide contenu dans le tube entrer en contact avec vos yeux ou votre peau.
- Si le liquide entre en contact avec vos yeux, rincez-les soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et si cela peut être fait facilement. Continuez le lavage. Si l'irritation des yeux persiste, consultez votre médecin.
- En cas de contact du liquide avec la peau, lavez abondamment à l'eau. Si l'irritation de la peau persiste, consultez votre médecin.
- Si vous avalez le liquide contenu dans le bouchon, rincez-vous la bouche avec beaucoup d'eau. Consultez immédiatement votre médecin.
- Ne pas libérer le produit dans l'environnement.
- Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité du produit disponible sur [www.vitro.bio/dt.aspx](http://www.vitro.bio/dt.aspx).

## À QUEL PRODUIT EST-IL STRICTEMENT INTERDIT ? Aux femmes qui :

- Avoir de la fièvre ou des symptômes semblables à ceux de la grippe, même s'ils sont légers.
- Elles ont déjà expérimenté le symptôme du choc toxique.
- Avoir des allergies aux plastiques et dérivés.
- Elles sont âgées de moins de 15 ans, sans le consentement de leurs parents et/ou du personnel médical.
- Elles n'ont pas lu les instructions incluses dans l'emballage.

## LES TESTS EFFECTUÉS SUR LE VOILE :

- Cytotoxicité (aucun effet cytotoxique potentiel).
- Sensibilisation (aucun effet potentiel de sensibilisation).
- Irritation vaginale (pendant 5 jours consécutifs sans effet potentiellement irritant pour les tissus vaginaux).
- Capacité d'absorption du voile (1,4 g).

## INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE SYNDROME DU CHOC TOXIQUE :

Le syndrome du choc toxique (SCT) est une infection rare mais potentiellement très dangereuse. Elle peut toucher les enfants, les hommes et les femmes (qu'ils aient ou non leurs règles). Il est causé par une toxine produite par une bactérie (*Staphylococcus*) que l'on trouve couramment dans le corps humain. La moitié des cas de SCT connus à ce jour sont survenus chez des femmes et des adolescentes en période de menstruation. Le SCT est associé à l'utilisation de tampons, mais peut également survenir pendant les périodes où d'autres moyens de protection sont utilisés (serviettes menstruelles, protège-slips, etc.). Le SCT est une infection qui peut être mortelle, il doit donc être identifié très tôt et soigné rapidement. Les symptômes du SCT peuvent apparaître soudainement pendant les règles ou peu après. Ils peuvent ne pas apparaître tous simultanément : fièvre soudaine, vomissements, diarrhée, maux de gorge, vertiges, évanouissements, douleurs musculaires, éruption cutanée ressemblant à un coup de soleil (la peau peut peler quelques jours plus tard). Si vous présentez ces symptômes, vous devez retirer votre voile, vous rendre chez votre médecin ou chez le médecin disponible le plus proche, en indiquant que vous avez vos règles. Le SCT peut survenir avec ou sans l'utilisation du voile. Si vous avez déjà eu un SCT, demandez à votre médecin ou gynécologue, pharmacien, si vous pouvez utiliser le voile. Si vous utilisez le voile correctement et que vous respectez ces recommandations, le risque de développer le syndrome du choc toxique est diminué.








## CONSERVATION :

Conserver dans un endroit propre et sec, à l'écart des sources de chaleur.

## INFORMATION DES CONSOMMATEURS :

N'utilisez pas le produit si l'emballage est endommagé ou après la date d'expiration.

Si malgré tout le soin apporté à la fabrication de nos produits, vous pensez avoir un produit défectueux, veuillez ne pas l'utiliser et contacter le service consommateurs ou le distributeur, en indiquant précisément le problème rencontré, ainsi que le numéro de lot indiqué sur l'emballage.

SYMBOLES D'ÉTIQUETTE	
 Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>	 Date d'expiration
 Référence catalogue	 Limite de température
 Numéro de lot	 Fabricant
 Ne pas s'exposer au soleil	